



Az infúzió gyorsabb és
biztonságosabb összeállításáért

Intrafix[®] SafeSet

INTRAFIX® SAFESET

MEGFELELNI NAPJAINK KIHÍVÁSAINAK EGY HASZNOS ÚJDONSÁG SEGÍTSÉGÉVEL...

A PRIME STOP automatizálja a légtelenítést, és véget vet a csepegésnek. E kényelmi funkció biztosítja a szerelékcsár infúziós oldattal való automatikus feltelődését. Az infúzió többé nem csepeg a kézre, a padlóra vagy az ágyneműre.

Mostantól egyidejűleg több infúziót is összeállíthatunk, méghozzá gyorsabban és higiénikusabb módon, mint ezelőtt bármikor. Miután a megfelelő folyadéknyóvt elérjük a cseppkamrában, a görgős cseppszabályzót egyszerűen megnyitjuk, és a folyadékoszlop – a levegőt a zöld védőkupak nyílásán át maga előtt tolva – szabadon végigáramlik a szerelékcsáron. És máris hozzáláthatunk a következő infúzió összekészítéséhez.


A PRIME STOP megőrzi a rendszer zárt jellegét, mindaddig, amíg a szereléket a beteghez csatlakoztatjuk. A légtelenített szerelékek így rövidebb ideig kontamináció kockázata nélkül is készenlétben tarthatók.

...ÉS FOKOZOTT BIZTONSÁGGAL

Az AIR STOP segít kivédeni a légbombóliát, és nem engedi levegősödni a szerelékcsárat.

Ez az innovatív újdonság állandó folyadékszintet tart fenn a cseppkamra alján az infúziós palack leürülését követően, akkor is, ha a görgős leszorító nincs elzárva. A beteg érpályájába így nem kerülhet levegő.

A kiürülő palack látványa többé nem ok az aggodalomra, így nem kell időt és energiát vesztegetni a riadt beteg körüli kapkodás miatt. Az AIR STOP-nak köszönhetően egyszerűsödik a soron következő infúzióra való átváltás. Nincs szükség az infúziós rendszer komplikált vagy kockázatos levegőztetésére.

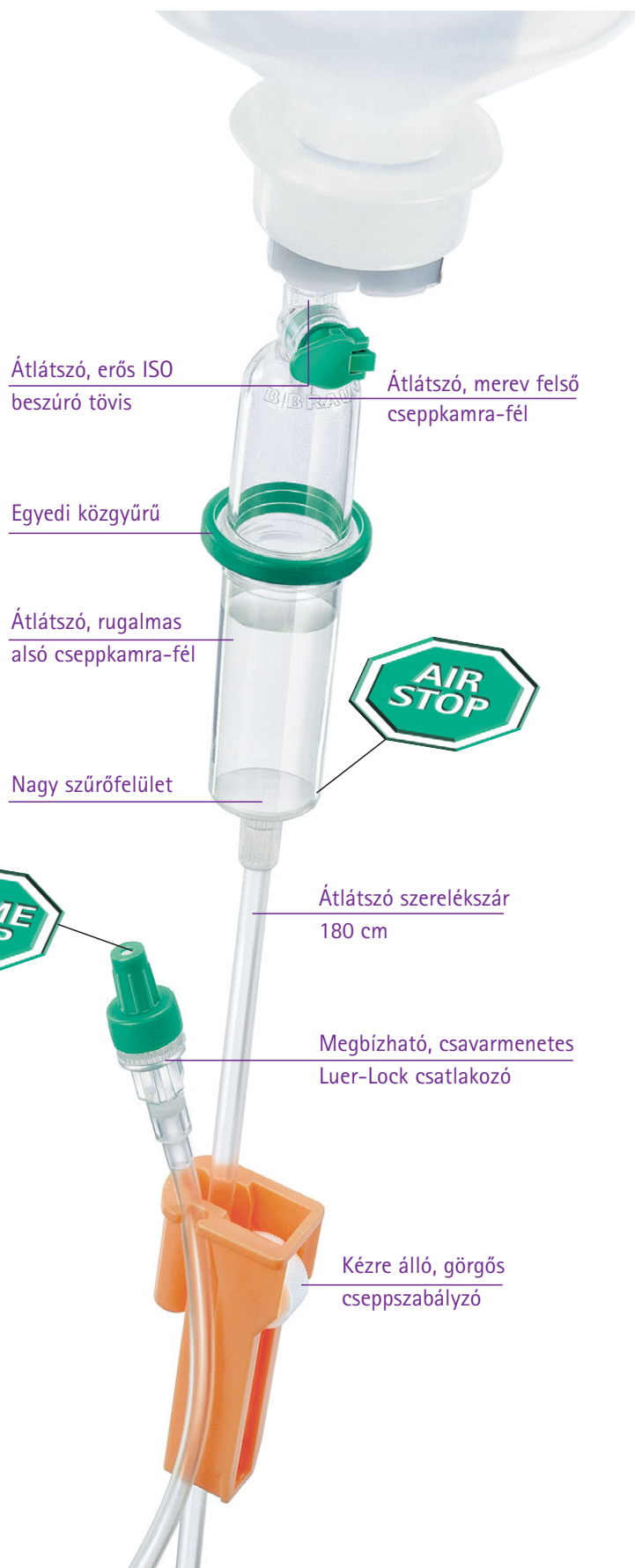

ERŐS, LEZÁRÓ MEMBRÁN



A különleges, légzáró membrán gátat képez a levegő útjában, miközben a szennyező részecskéket is visszatartja. Állandó folyadékszintet tart fent a cseppkamra alján az infúziós palack leürítését követően – a görgős leszorító elzárása nélkül is.

PRIMESTOP – HIDROFÓB MEMBRÁNNAL BÉLELT VÉDŐKUPAK



Az új hidrofób membránnal bélelt védőkupak meggátolja a folyadék szivárgását és véd a kontaminációtól is. Egyidejűleg több infúzió összeállítás történhet gyorsabban és higiénikusabb módon az automatizált légtelenítésnek köszönhetően. A PrimeStop membránnak köszönhetően az Intrafix® SafeSet zárt rendszert biztosít mindaddig, amíg a szerelést a beteghez csatlakoztatjuk.

ELŐNYÖK

- Az infúziós szerelékbe jutó levegő elleni védelem
- Kompatibilis eszközökkel történő újracsatlakozáskor idő és pénz takarítható meg
- Az infúziós szerelések légtelenítése egyszerűbb, gyorsabb és lényegesen kevesebb kockázattal jár

INTRAFIX® SAFESET

GYAKORLATI TANÁCSOK



A bemeneti nyílás fertőtlenítését követően (nem szükséges az Ecoflac® plus használatakor, amelynek csatlakozója baktériummentes) szűrje át a zsákot vagy üveget függőleges irányban, felfüggesztés előtt pedig zárja el a cseppszabályzót.



Nyomja össze a cseppkamra alsó részét és állítsa a folyadékszintet a csepegtető kamra gyűrűjének szintjébe. Ha összeeső tárolót használt, mint például az Ecoflac® plus, tartsa a levegőztető sapkát zárva. Infúziós üveg használatakor nyissa ki a levegőztető sapkát.




Akassza be a szerelék másik végét az áramlás-szabályzó szélébe. Nyissa ki a szabályzót, ez elindítja a folyadékáramlást, ami elvégzi az automatikus légtelenítést.



Távolítsa el az infúziós szerelékét az áramlásszabályozóból és csatlakoztassa azt a beteghez. Figyelem: Zárja el a szabályzót!



Nyomja el oldalirányban a beépített PrimeStop védősapkát és távolítsa el. Csavarja a szerelék végét a Luer vénás csatlakozóhoz.

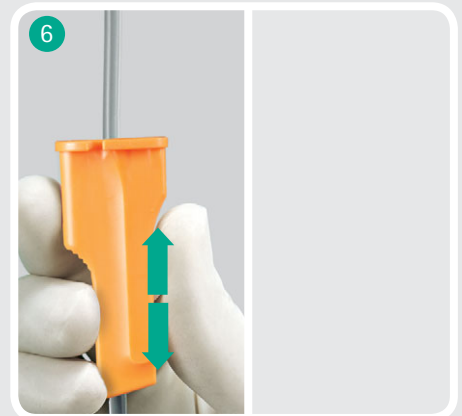

Nyissa ki az áramlásszabályzót, és állítsa be a kívánt cseppszámot. Amikor az infúzió lecsöpögött: a cseppkamrába beépített AirStop meggátolja azt, hogy levegő kerüljön a szerelékbe.

GYAKORLATI TANÁCSOK / KEZELÉSI TIPPEK

INTRAVÉNÁS INFÚZIÓS SZERELÉKEKHEZ



Kézi légtelenítő szelep

A következő esetekben a levegőztető szelepek mindvégig zárt állapotban kell maradnia

Felhasználási terület

Az infúzió előkészítésekor: csatlakoztassa a szerelékét az infúziós tasakhoz függőleges helyzetben, majd légtelenítse a csatlakozó szerelékét

Infúzió beadásakor

Az infúzió megszakítása:

- injekciózásakor
- a páciens szállításakor
- az infúzió újracsatlakoztatásakor

Összeeső palack vagy tasak esetén

A levegőztető szelep maradjon zárt állapotban

A levegőztető szelep maradjon zárt állapotban

A maradéktalan légtelenítés érdekében az infúzió megszakítása előtt a levegőztető szelepet zárva kell tartani vagy meg kell bizonyosodni a zárt állásról

Merev- vagy üvegfalú palack esetén


A levegőzőszelepet csak a megfelelő folyadékszint beállítása után szabad kinyitni, az infúzió összeállítása után el kell zárni

Levegőzőszelep nyílt állásban


A maradéktalan légtelenítés érdekében az infúzió megszakítása előtt meg kell bizonyosodni a zárt állásról

A különböző szűrőmembránok felépítése

A cseppkamrában található AirStop membrán kialakítása különbözik a hagyományos infúziós szerelésekben található folyadékszűrőktől:

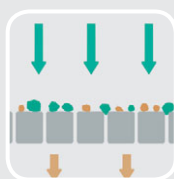

Hagyományos 15 µm-es membrán

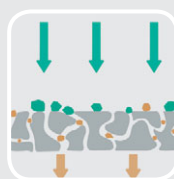

AirStop légzáró filtermembrán

Felhasználói előnyök

- Megakadályozza a levegő infúziós szerelékbe* kerülését, csökkentve ezzel a fertőzés kockázatát
- A kompatibilis megoldásokkal azonnal csatlakoztatható így használata idő- és költséghatékony

*Kérjük, vegye figyelembe az általános biztonsági előírásokat. A tömegtermelésben gyártott termékek esetében az adott gyártási technológiából adódóan előfordulhatnak a megszokottól eltérő funkcionalitásbeli különbségek.

Mi a teendő, ha az infúzió nem működik megfelelően?



A membrán kialakításának köszönhetően biztosan tartja vissza a levegőt úgy, hogy a cseppkamra folyadékszintje változatlan marad. Az infúziós szerelék feltöltéséhez vegye figyelembe az alábbi megjegyzéseket:

FONTOS:


Az infúzió kezelésekor a levegőzőszelep mindig legyen zárva!

KIVÉTEL :

A 4. ábra instrukciói a töltési idő megrövidítéséhez

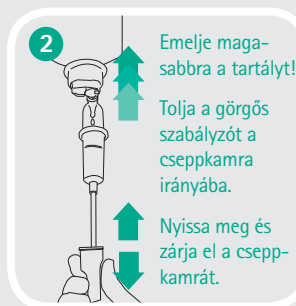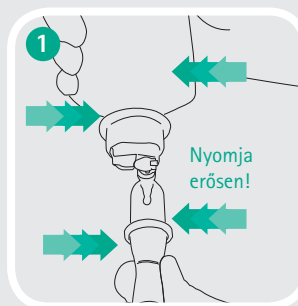

INTRAVÉNÁS INFÚZIÓS SZERELÉKEK

Termék	<ul style="list-style-type: none"> ● Latex-mentes ○ PVC-mentes ○ DEHP-mentes 	Típus	Szerelék hossza [cm]	Eladási egység [db]	Cikkszám
Intrafix® SafeSet Modern infúziós szerelék AirStop és PrimeStop funkciókkal. Gravitációs és nyomásos infúziókhoz, infúziós pumpákhoz (nyomásállóság: 2 bar). <ul style="list-style-type: none"> ■ Automatikus, baktériumvédő levegőző ■ 15 µm-es szűrő ■ Nyomásbiztos 2 bar-ig ■ Luer-lock csatlakozó ■ DIN ISO EN 8536-8 szabványnak megfelelően kialakított ■ Áramlási ráta: 126 ml/perc 	<ul style="list-style-type: none"> ● ○ ○ 	Standard	180	100	4063000
		Visszacsapó szeleppel	180	100	4063001*
		Neutrapur	180	100	4063002**
		Standard	230	100	4063003*
		Tűmentes Y-injekciózó porttal, Safeflow szeleppel	210	100	4063004
		Háromirányú Discofix® C csappal	200 + 20	100	4063006*
		Háromirányú Discofix® C csappal és visszacsapó-szeleppel	180 + 15	100	4188136*
		SafeSet UV-védett (narancs)	180	100	4063131***

* Magyarországon engedélyeztetés alatt

** Csak gravitációs infúzióhoz

*** PVC-mentes / PUR (infúziós pumpákkal nem kompatibilis)

B. Braun Trading Kft. | 1023 Budapest, Felhívízi u. 5.
Tel.: +36 (1) 346 9700 | Fax: +36 (1) 438 4900 www.bbraun.hu
www.facebook.com/BBraunHU