


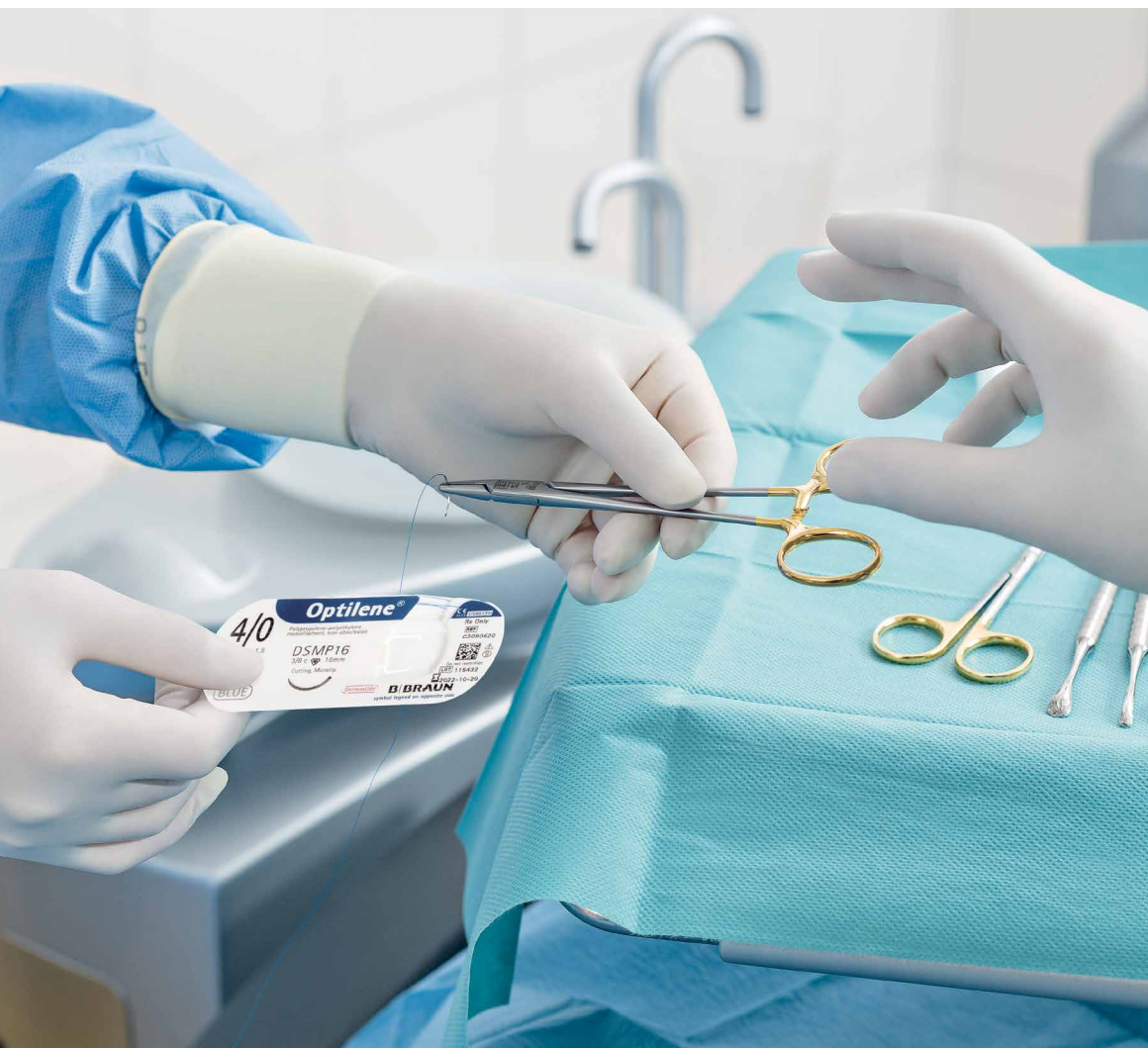

PROFESSZIONÁLIS FOGÁSZATI ANYAGOK

TARTALOM

4 SEBÉSZETI VARRÓANYAGOK

5 B. Braun varrótű nomenklátúra

6 Novosyn®

9 Novosyn® Quick

12 Monosyn®

14 Monosyn® Quick

16 Optilene®

19 Dafilon®

21 Silkam®

24 Supramid®

26 PremiCron®

28 MEMBRÁNOK ÉS VÉRZÉSCSILLAPÍTÓK

29 Lyoplant®

30 Lyostypt®

31 Bone wax

33 AESCULAP® KÉZIMŰSZEREK

34 Egyszer használatos steril szikék

35 Szikenyelék és steril szikepengék

36 Aesculap fogászati műszerek

39 INFЕКCIÓKONTROLL

40 Fertőtlenítőszer

46 Fali adagolók

49 EGYSZER HASZNÁLATOS FOGYÓESZKÖZÖK

50 Sterican®

52 Injekt®

53 Omnifix®

SEBÉSZETI VARRÓANYAGOK

B. BRAUN VARRÓTŰ NOMENKLATÚRA

A KÜLÖNBÖZŐ TŰTÍPUSOK AZONOSÍTÁSÁRA A B. BRAUN AZ ALÁBBI NOMENKLATÚRÁT ALKALMAZZA:


A	B	C	12	D
Tű görbülete	Tűtest típusa	Tűhegy típusa	Tűhossz	Megjegyzés
S 1/8 körív	R szűrőtű	T trokár hegy	A tűhegy és a tűfok közötti távolság mm-ben, a tűtest mentén mérve	ff extra vékonyított tűtest
V 1/4 körív	S vágótű	N tompa hegy		f vékonyított tűtest
D 3/8 körív	L spatula	S sternum hegy		s nehezített tűtest
H 1/2 körív	G trapéz	C rövid tűhegy		ss extra nehezített tűtest
F 5/8 körív		M mikro hegy		v letörhető tű
G egyenes		MP precíziós hegy		b fekete tű
P progresszíven hajlított		m mikro tű		
J horog		mV micro vasculáris		
SK sítalp		B biztonsági hegy		

Példa:

H	R	C	26	
----------	----------	----------	-----------	--

HRC 26 → 1/2 körívű szűrőtű, rövid tűhegygel, 26 mm hosszú.

A körívek görbülete

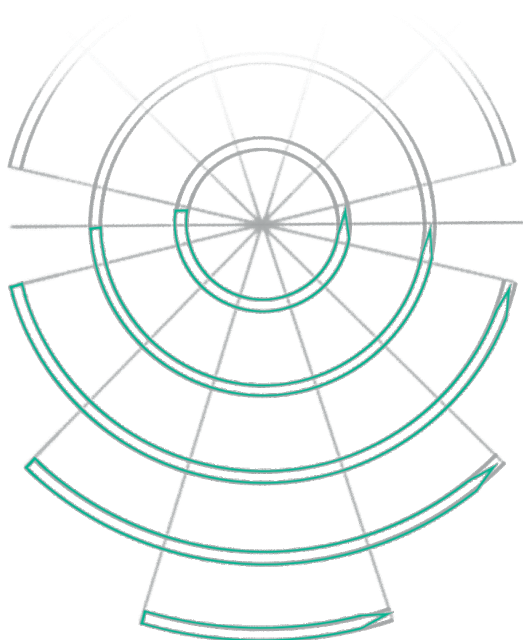


- S 1/8 kör
- V 1/4 kör
- D 3/8 kör
- H 1/2 kör
- F 5/8 kör

"Take off" eltávolítható tű

A tű varróanyagból történő, ollóhasználat nélküli eltávolításához feszítsük meg és biztosítsuk a varróanyagot, majd a tűfogóval fogjuk meg a tűt. Ezt követően a tűfogót egyenesen húzva eltávolíthatjuk a tűt a varróanyagból.

Egyebek

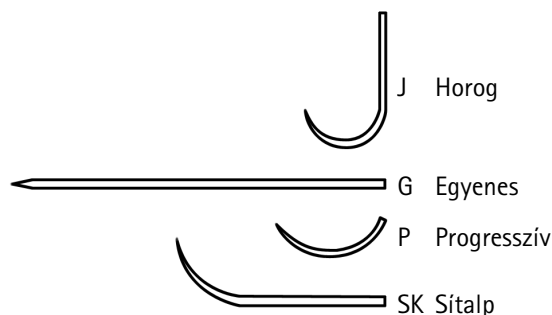

LEÍRÁS


A Novosyn® egy közepes felszívódású, fonott szintetikus varrófonal, amelynek alapanyaga poliglaktin 910. A Novosyn® hidrolízis útján, kiszámítható és megbízható felszívódási folyamat során bomlik le.

INDIKÁCIÓ

- Belsősebészet
- Szülészeti/Nőgyógyászati
- Ortopédia
- Szemészet
- Urológia
- Bőrzárás (intrakután, szubkután)
- Ligatúrák



ELŐNYÖK

- Sima csomólekötés
- Finom csomó-újrapozicionálás
- Magas csomótartási képesség
- Minimalizált gyulladásos reakció

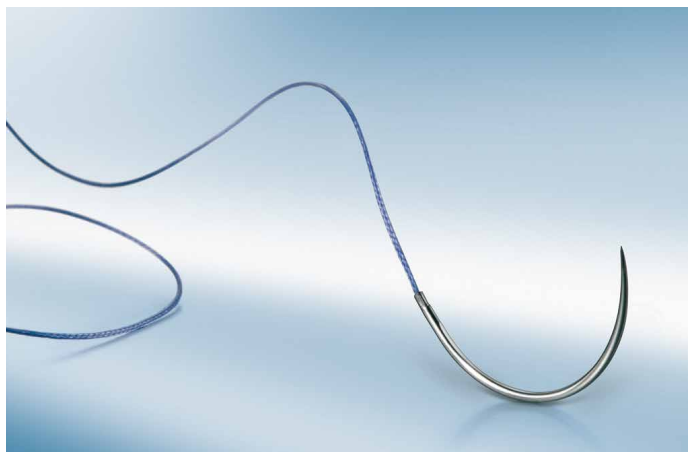

TERMÉKÁTTEKINTÉS

Szerkezet	Fonott 
Színe	lila, színtelen
Kémiai összetétel	Poliglaktin 910
Bevonat	Poliglaktin 35/65
Alapanyag	Szintetikus
Mérete	USP 8/0 (metrikus 0,4) – USP 2 (metrikus 5)
Felszívódás típusa	Felszívódás hidrolízis útján
Teljes felszívódás	56 és 70 nap között
Szakítószilárdság megtartása	Eredeti szakítószilárdság 50%-nak megtartása 21 napig
Sterilizálás	Etilén-oxid

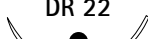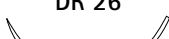Tű hosszúság (mm)	Fonal hosszúság (cm) szín	USP metrikus					
		6/0 0,7	5/0 1	4/0 1,5	3/0 2	2/0 3	0 3,5
3/8 körívű fordított vágótű							
 DS 12	45 70 lila	C0068206	C0068207				
	45 70 színtelen						
 DS 16	45 70 90 lila		C0068212	C0068213 C0068513			
	45 70 színtelen			C0069213	C0069302		
 DS 19	45 70 90 lila		C0068219	C0068220	C0068221	C0068422	
	45 70 90 színtelen				C0069221		
 DS 24	70 lila				C0068235	C0068236	
3/8 körívű körtestű tű							
 DR 12	45 70 lila						
 DR 18	70 lila		C0068155	C0068150	C0068151		
 DR 22	70 lila						
 DR 26	70 lila						

Tű hosszúság (mm)	Fonal hosszúság (cm) szín	USP metrikus					
		6/0 0,7	5/0 1	4/0 1,5	3/0 2	2/0 3	0 3,5
1/2 körívű fordított vágótű							
 HS 15	45						
	70 lila						
 HS 21	45				C0068226		
	70 lila						
 HS 23	70 lila						
	45 70 színtelen						
1/2 körívű szűrőtű							
 HR 10	70 lila						
 HR 13	45	C0068449	C0068450				
	70 90 lila	C0068006	C0068007	C0068008			
 HR 17	70 lila		C0068012	C0068013	C0068014		

Novosyn® Quick

FELSZÍVÓDÓ VARRÓANYAG

LEÍRÁS


Poliglaktin 910 alapanyagú, fonott varróanyag gyors lebomlási profillal. A Novosyn® Quick lágy szövet-záráshoz javallott, azokban az esetekben, amikor csak rövid távú sebzésre van szükség, és a varrófonal gyors lebomlása előnnyel jár.

INDIKÁCIÓ

- Nőgyógyászat/Szülészet (pl. gátmetszés)
- Urológia
- Fogászat (pl. szájnyálkahártya)
- Gyermeksebészet
- Bőr zárása (intrakután, szubkután)
- Ligaturák

ELŐNYÖK

- Gyors és kiszámítható lebomlási profil
- Síma felület
- Magas kezdeti szakítószilárdság
- Jó csomóbiztonság
- Magas fokú rugalmasság és kezelhetőség
- Gyors felszívódás

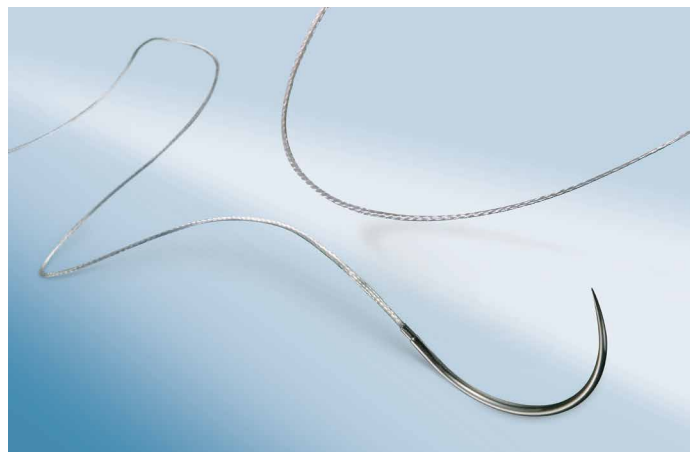

TERMÉKÁTTEKINTÉS

Szerkezet	multifil 
Színe	színtelen
Kémiai összetétel	Poliglaktin 910
Bevonat	Poliglaktin 370 + Kalcium-sztearát
Mérete	USP 2 (metrikus 5) – USP 6/0 (metrikus 0,7)
Felszívódás típusa	Hidrolízis útján
Teljes felszívódás	42 nap
Szakítószilárdság megtartása	Eredeti szakítószilárdság 50%-nak megtartása 5 napig
Sterilizálás	Gamma-sugárzás

Novosyn® Quick

FELSZÍVÓDÓ VARRÓANYAG

Tű hosszúság (mm)	Fonal hosszúság (cm) szín	USP metrikus					
		6/0 0,7	5/0 1	4/0 1,5	3/0 2	2/0 3	0 3,5
3/8 körívű fordított vágótű							
DS 12 	70 színtelen	C3046202	C3046203				
DS 16 	70 színtelen	C3046212	C3046213	C3046214			
DS 19 	45 70 színtelen		C3046220 C3046420	C3046221 C3046421			
DS 24 	45 70 színtelen		C3046234	C3046235	C3046536 C3046236		
3/8 körívű fordított vágótű mikro hegygel							
DSMP 11 	45 70 színtelen	C3046603					
DSMP 13 	45 színtelen		C3046619	C3046620			
DSMP 16 	45 70 színtelen			C3046685			
DSMP 19 	45 70 színtelen			C3046629 C3046529			
DSMP 24 	45 70 színtelen				C3046657	C3046658	

Tű hosszúság (mm)	Fonal hosszúság (cm) szín	USP metrikus					
		6/0 0,7	5/0 1	4/0 1,5	3/0 2	2/0 3	0 3,5
1/2 körívű szűrőtű							
HR 13 	70 színtelen	C3046002					
HR 17 	70 színtelen	C3046012	C3046013	C3046014			
HR 22 	45 70 színtelen		C3046029	C3046024 C3046030	C3046031		
1/2 körívű fordított vágótű							
HS 15 	45 színtelen			C3046204			
HS 18 	45 színtelen			C3046226			
HS 23 	45 színtelen			C3046229	C3046230	C3046231	

LEÍRÁS


A Monosyn® közepes idő alatt felszívódó, glikonátból készült szintetikus monofil varróanyag, amely kapható színezetlen változatban felületi sebek zárásához, illetve lila színben egyéb alkalmazásokhoz. A Monosyn® kiváló kezelési tulajdonságokkal rendelkezik és biztos csomózást tesz lehetővé. A Monosyn® minden fajta lágy szövethez javasolt.

INDIKÁCIÓK

- Hasi sebészet
- Nőgyógyászat/Szülészet
- Urológia
- Plasztikai és rekonstruktív sebészet
- Bőrzárás (intra, sub, felszíni)
- Lekötések

ELŐNYÖK

- Magas kezdő szakítószilárdság
- Ideális a lágy szövetekhez
- Kiváló csomózhatóság
- Egyenletes, sima áthaladás a szöveteken
- Gyors felszívódás

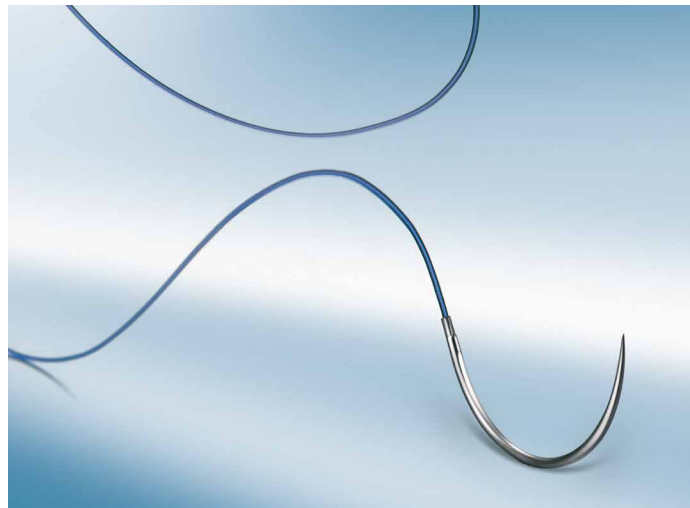

TERMÉKÁTTEKINTÉS

Szerkezet	Monofil
Szín	Színezetlen vagy lila
Kémiai összetétel	Glikonát
Bevonat	Bevonat nélküli
Alapanyag	Szintetikus
Méretek	USP 6/0 (metrikus 0,7) – USP 1 (metrikus 4)
Felszívódás típusa	Hidrolízis által
Teljes felszívódás	60 és 90 nap között
Szakítószilárdság megtartása	Eredeti szakítószilárdság 50%-nak megtartása 14 napig
Sterilizálás	Etilén-oxid

Tű hosszúság (mm)	Fonal hosszúság (cm) szín	USP metrikus					
		6/0 0,7	5/0 1	4/0 1,5	3/0 2	2/0 3	0 3,5
1/2 körívű szúrótű							
HR 13 	70 lila	C2022007	C2022008				
HR 17 	70 lila		C2022003	C2022004	C2022005		
HR 22 	45 70 lila			C2022014	C2022015		
HR 26 	70 90 lila			C2022024	C2022025 C2022425	C0022026	C0022027
3/8 körívű szúrótű							
DR 18 	70 lila			C2022094			
1/2 körívű fordított vágótű							
HS 23 	70 színtelen			C0023224	C2023225	C0023226	
HS 26 	70 színtelen					C0023240	
3/8 körívű fordított vágótű							
DS 12 	45 70 70 undyed		C0023412 C2023412	C0023413 C2023413	C0023414 C2023414		
DS 16 	45 45 violet 45 45 70 70 undyed			C0022419 C2022419			
DS 19 	70 70 violet 45 45 70 70 undyed			C0023503 C0023403 C2023403	C0022204 C2022204 C0023204 C2023204 C0023404 C2023404	C0023425 C2023425 C0023205 C2023205 C0023405 C2023405	
DS 24 	70 violet 45 70 70 undyed				C0023214 C2023214	C2023115 C0023215 C2023215	C0022216 C0023216 C2023216

Monosyn® Quick

FELSZÍVÓDÓ VARRÓANYAG

LEÍRÁS

A Monosyn® Quick egy szintelen, rövid távon felszívódó, szintetikus monofil varrófonal, amely gyors gyógyulási folyamatot biztosít a lágy szövetek zárásakor.

Kiváló kezelhetőségének és magas csomózott szakítószilárdságának köszönhetően mindenfajta lágy szövethez javallott.

INDIKÁCIÓ

- Plasztikai sebészet
- Szülészeti- és nőgyógyászat
- Urológia és gyermeksebészet
- Fül-orr-gégészeti és fogászat
- Arcsebészet

ELŐNYÖK

- Rövid távú felszívódás
- Magas csomózott szakítószilárdság
- Könnyű kezelhetőség



TERMÉKÁTTEKINTÉS

Szerkezet	Monofil
Színe	színtelen
Kémiai összetétel	glikonát
Bevonat	Bevonat nélkül
Alapanyag	Szintetikus
Mérete	USP 6/0 (metrikus 0,7) – USP 1 (metrikus 4)
Felszívódás típusa	Felszívódás hidrolízis útján
Teljes felszívódás	56 nap
Szakítószilárdság megtartása	Eredeti szakítószilárdság 50%-nak megtartása 6-7 napig
Sterilizálás	Etilén-oxid

Tű	Fonal	USP metrikus					
hosszúság (mm)	hosszúság (cm) szín	6/0 0,7	5/0 1	4/0 1,5	3/0 2	2/0 3	0 3,5
1/2 körívű szúrótű							
HR 13 	45 színtelen						
HR 17 	45 70 színtelen	C0025216	C0025225				
HR 22 	45 70 színtelen				C0025246		
1/2 körívű fordított vágótű							
HS 15 	45 színtelen						
HS 18 	70 színtelen						
HS 23 	45 színtelen						
3/8 körívű fordított vágótű							
DS 12 	45 70 színtelen						
DS 16 	45 70 színtelen		C0025125 C0025331	C0025126 C0025332	C0025333		
DS 19 	45 70 színtelen			C0025002	C0025003	C0025009	
DS 24 	45 70 színtelen				C0025351 C0025012		
3/8 körívű fordított vágótű mikro hegygel							
DSMP 11 	45 színtelen	C0025020					
DSMP 13 	45 színtelen						
DSMP 16 	45 színtelen			C0025029			
DSMP 19 	45 70 színtelen			C0025032			

Optilene®

NEM FELSZÍVÓDÓ VARRÓFONALAK

LEÍRÁS


Az Optilene® egy steril, nem felszívódó monofil sebészeti varrófonal, amelynek alapanyaga polipropilén és polietilén. Kék színe jobb láthatóságot biztosít. Az Optilene® a memóriahatást megakadályozó RacePack® és LongPack® csomagolásban is elérhető. Speciális kiegészítései Premipatch® PTFE pledgeteket is tartalmaznak.

INDIKÁCIÓ

- Szívsebészet
- Idegsebészet
- Szemészet
- Mikrosebészet
- Általános lágy szövet-zárás






ELŐNYÖK



- Kiemelkedően konzisztens szakítószilárdság
- Kiváló, sima felület
- Kontrollált, egyszerű csomózhatóság
- Könnyed áthatolás a szöveten, továbbfejlesztett rugalmasság
- Kontrollált meggyulladás
- Jó kezelhetőség és csomószilárdság
- Jobb láthatóság
- Alacsony memóriaeffektus
- CV Pass és CV Pass EasyBlack tűk

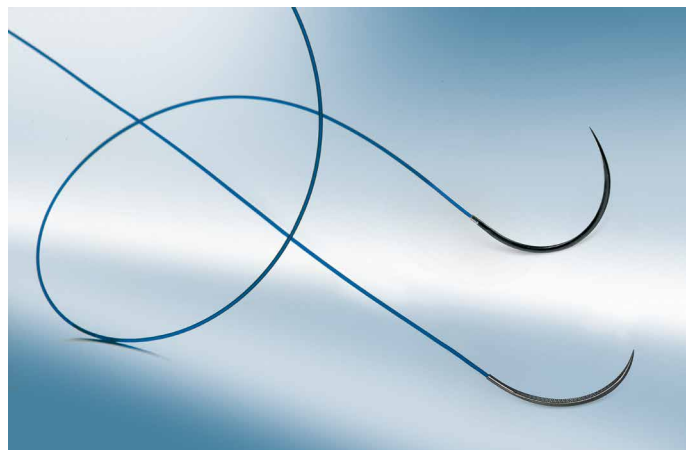

TERMÉKÁTTEKINTÉS

Szerkezet	Monofil
Szín	Kék
Kémiai összetétel	Polipropilén és polietilén
Bevonat	Bevonat nélküli
Alapanyag	Szintetikus
Méret	USP 10/0 (metrikus 0,2) – USP 0 (metrikus 3,5)
Felszívódás típusa	Nem felszívódó
Sterilizálás	Gamma sterilizálás / ETO (mikrosebészet 7/0 tól 11/0-ig)

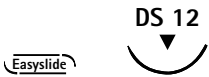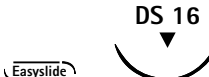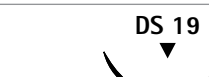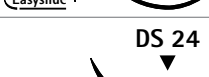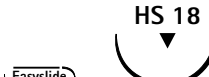Tű hossz mm	Fonal hossz (cm) szín	USP metrikus					
		6/0 (0.7)	5/0 (1)	4/0 (1.5)	3/0 (2)	2/0 (3)	0 (3.5)
3/8 körívű fordított vágótű							
	45 kék	C3090206	C3090207				
	45 75 kék	C3090211	C3090212 C3090512	C3090213 C3090513			
	45 kék		C3090219	C3090220	C3090221		
	45 75 kék			C3090434	C3090435	C3090436 C3090236	
	45 75 kék				C3090246	C3090447 C3090247	
1/2 körívű fordított vágótű							
	45 kék						
	75 kék						
3/8 körívű szúrótű							
	75						
	75			C3090120			

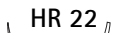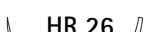Tű hosszúság (mm)	Fonal hosszúság (cm) szín	USP metrikus					
		6/0 0,7	5/0 1	4/0 1,5	3/0 2	2/0 3	0 3,5
3/8 körívű fordított vágótű							
DS 12 	45	C3090206	C3090207	C3090208	C3090205		
DS 16 	45	C3090211	C3090212	C3090213			
DS 19 	45 75		C3090219 C3090519	C3090220 C3090520	C3090221 C3090521		
DS 24 	45 75			C3090434 C3090234	C3090435 C3090235	C3090436 C3090236	C3090237
1/2 körívű körtestű tű							
HR 13 	75		C3090500				
HR 17 	75		C3090012	C3090013	C3090014		
HR 22 	75			C3090029	C3090030		
HR 26 	75			C3090040	C3090041	C3090042	

LEÍRÁS


A Dafilon® szintetikus, polimerekből készült nem felszívódó monofil varróanyag, Poliamid 6/6.6 (kék), Poliamid 6.6 (fekete) vagy Poliamid 6 (színezetlen). A kék Dafilon® és a színezetlen Dafilon® a felületi sebek zárásához és plasztikai sebészetben használható. A fekete Dafilon® a mikrosebészetben és szemészeti célokra használható. Mint minden szintetikus varróanyag, ez sem szívódik fel, azonban idővel fokozatosan elveszítheti szakítószilárdságát

INDIKÁCIÓK

- Bőrzárás (intra, sub, felszíni)
- Plasztikai és rekonstrukciós sebészet
- Mikrosebészet
- Szemsebészet
- Idegsebészet

ELŐNYÖK

- Flexibilitás, könnyű kezelhetőség
- Egyenletes és sima áthaladás a szöveteken
- Kiváló szövetkompatibilitás

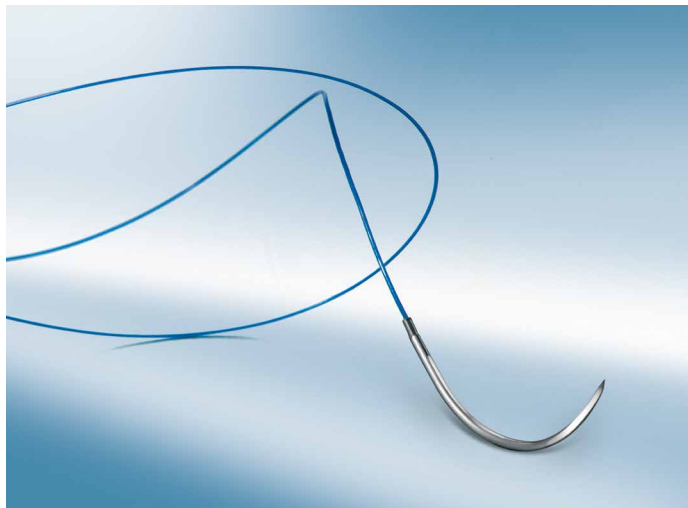

TERMÉKÁTTEKINTÉS

	Monofil
Szerkezet	
Szín	Kék, színtelen, fekete
Kémiai összetétel	Poliamid
Bevonat	Bevonat nélküli
Alapanyag	Szintetikus
Méret	USP 11/0 (metrikus 0,1) – USP 1-ig (metrikus 4)
Felszívódás típusa	Nem felszívódó
Sterilizálás	Gamma sterilizálás / ETO (mikrosebészet 7/0 tól 11/0-ig)

Tű hosszúság (mm)	Fonal hosszúság (cm) szín	USP metrikus					
		6/0 0,7	5/0 1	4/0 1,5	3/0 2	2/0 3	0 3,5
1/2 körívű fordított vágótű							
 HS 21	90 kék			C0932876	C0932884		
 HS 26	75 90 kék				C0932957	C0935964	
3/8 körívű fordított vágótű							
 DS 12	45 kék	C0932060	C0932078	C0932086			
 DS 16	45 75 kék	C0932116	C0932124 C0935123	C0932132 C0935131	C0932140 C0935107		
 DS 19	45 75 kék		C0932191 C0935190	C0932205 C0935204	C0932213 C0935212	C0932221	
 DS 24	45 75 kék			C0932345 C0935344	C0932353 C0935352	C0932361 C0935360	C0935379
	90 kék				C0935328	C0935336	

LEÍRÁS


A Silkam® nem felszívódó, sodrott és bevonattal ellátott varróanyag természetes selyemszálakból készül. A Silkam® elsősorban olyan esetekben alkalmazható, ahol a sebészeti gyakorlat szerint nem felszívódó varróanyagot kell használni. A Silkam® fekete színben kapható.

INDIKÁCIÓK

- Általános sebészet
- Bőrzárás (intra, sub, felszíni)
- Szájsebészet
- Idegsebészet
- Lékötések

ELŐNYÖK

- Kiváló kezelhetőség
- Jó csomóbiztonság

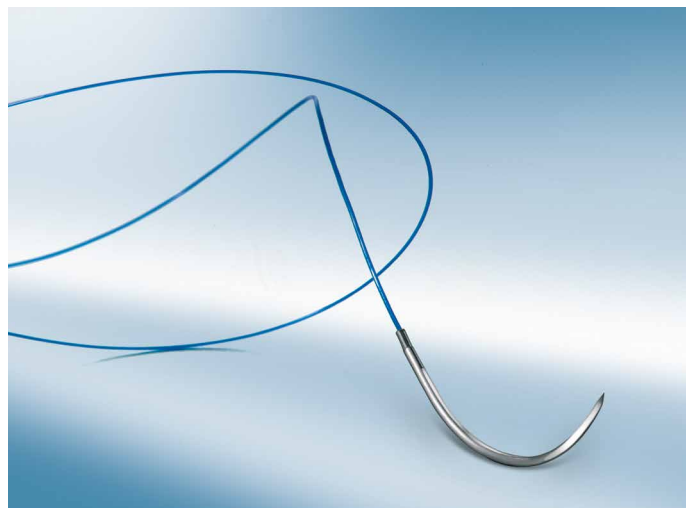

TERMÉKÁTTEKINTÉS

Szerkezet	Sodrott (Silkam)
Szín	Fekete
Kémiai összetétel	Természetes selyemszálak
Bevonat	Wax és szilikon
Alapanyag	Selyemhernyó lárvagubója
Méretek	USP 9/0 (metrikus 0,3) – USP 6-ig (metrikus 8)
Felszívódás típusa	Nem felszívódó
Sterilizálás	Gamma sterilizálás

Tű hosszúság (mm)	Fonal hosszúság (cm) szín	USP metrikus					
		6/0 0,7	5/0 1	4/0 1,5	3/0 2	2/0 3	0 3,5
1/2 körívű szúrótű							
	75		C0760129	C0760137	C0760145	C0760153	
	75			C0760293	C0760307	C0760315	
	75			C0760404	C0760412	C0760420	
3/8 körívű szúrótű							
	45			C0761133			
	75				C0761214		
1/2 körívű fordított vágótű							
	45 75		C0762032 C0765490	C0762040	C0762059		
	45 75			C0762253 C0764825	C0762261 C0764248	C0764175	
	45				C0762300	C0762326	
	75			C0762407	C0762415	C0762423	

Tű hosszúság (mm)	Fonal hosszúság (cm) szín	USP metrikus					
		6/0 0,7	5/0 1	4/0 1,5	3/0 2	2/0 3	0 3,5
3/8 körívű fordított vágótű							
DS 12 	45	C0762067	C0762075	C0762083	C0762091		
	75		C0765074				
DS 16 	45	C0762113	C0762121	C0762130	C0762148		
	75		C0764124	C0764132	C0764140		
DS 19 	45		C0762199	C0762202	C0762210		
	75		C0765198	C0765201	C0765210		
DS 24 	75			C0762342	C0762350	C0762369	

SUPRAMID®

NEM FELSZÍVÓDÓ VARRÓANYAG

LEÍRÁS

A Supramid szintetikus, nem felszívódó, poliamidból készült varróanyag, amely a fonal átmérőjétől függően kétféle kialakításban kapható:


- Supramid pseudo-monofil poliamid-6.6 szál poliamid-6 bevonattal, USP 3 – 4/0 méretben
- Supramid monofil varróanyag poliamid-6-ból készült, USP 5/0 – 6/0 méretben.

INDIKÁCIÓK

- Bőrzárás (intra, sub, felszíni)

ELŐNYÖK

- Könnyű kezelhetőség – a monofil és a fonott varróanyagok kedvező tulajdonságait ötvözi
- Sima, egyenletes felület felületnek köszönhetően sima áthaladás a szöveteken
- Könnyű eltávolítás
- Alacsony szöveti reakció

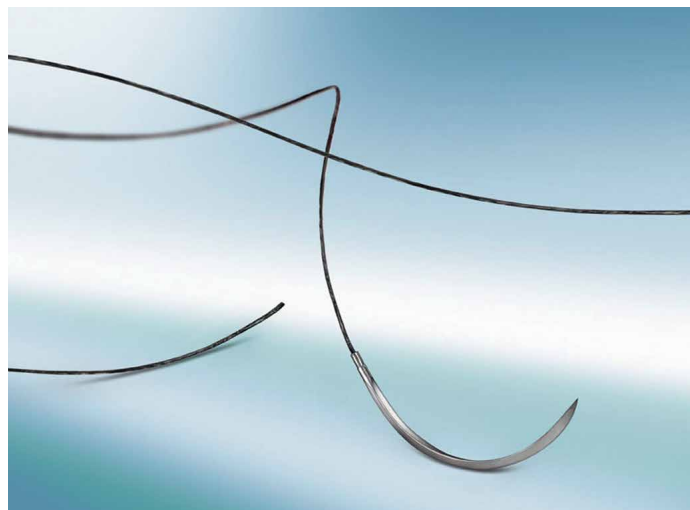

TERMÉKÁTTEKINTÉS

Szerkezet	Monofil (USP 5/0-6/0) Pseudo-monofil (USP 3 – 4/0) 
Szín	Fehér vagy fekete
Kémiai összetétel	Poliamid
Bevonat	Bevonat nélküli
Méret	USP 6/0 (metrikus 0,7) – USP 3-ig (metrikus 6)
Felszívódás típusa	Nem felszívódó
Sterilizálás	Gamma sterilizálás

Tű hosszúság (mm)	Fonal hosszúság (cm) szín	USP metrikus					
		6/0 0,7	5/0 1	4/0 1,5	3/0 2	2/0 3	0 3,5
1/2 körívű fordított vágótű							
	45 fekete		C0762342	C0712043	C0712051		
	45 fekete		C0712248	C0712256	C0712264		
	45 fekete				C0712302		
	75 fekete				C0712418	C0712426	
3/8 körívű fordított vágótű							
	45 fekete	C0712060	C0712078	C0712086			
	45 fekete		C0712124	C0712132	C0712140		
	45 75 fekete		C0712191	C0712205 C0714208	C0712213 C0714216	C0712221	
	45 75 fekete			C0712345	C0712353 C0714356	C0712361 C0714364	C0712370

PremiCron®

NEM FELSZÍVÓDÓ VARRÓANYAG

LEÍRÁS


A PremiCron® szintetikus, nem felszívódó, poliészter szálakból készült, fonott multifil varróanyag. A PremiCron® egyenletes szilikonbevonattal rendelkezik, amely növeli a felület síkosságát, és ezáltal a fonal kezelhetősége is javul. Kapható egyes csomagolásban (1, 2 varróanyag) vagy multi csomagban (4, 8 varróanyag), zöld és fehér színben egyaránt.

INDIKÁCIÓK

- Szívsebészet
- Ortopédia



ELŐNYÖK

- Továbbfejlesztett atraumatikus szövetegyesítés
- Kiváló csomólevezetés
- Optimális csomózhatóság

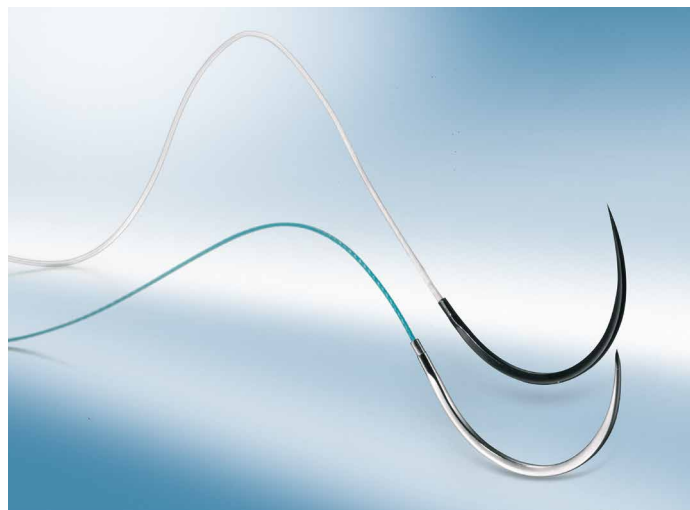

TERMÉKÁTTEKINTÉS

Szerkezet	Fonott
Szín	Zöld vagy fehér
Kémiai összetétel	Poliészter
Bevonat	Szilikon
Méret	USP 6/0 (metrikus 0,7) – USP 5-ig (metrikus 7)
Felszívódás típusa	Nem felszívódó
Sterilizálás	Gamma sterilizálás/ ETO

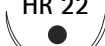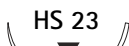Tű hosszúság (mm)	Fonal hosszúság (cm) szín	USP metrikus					
		6/0 0,7	5/0 1	4/0 1,5	3/0 2	2/0 3	0 3,5
1/2 körívű szúrótű							
	45 zöld		C0026029	C0026030			
	75 zöld		C0026003	C0026004	C0026005	C0026006	
	75 zöld			C0026024	C0026025	C0026026	
	75 zöld			C0026014	C0026015	C0026016	C0026017
3/8 körívű szúrótű							
	75 zöld			C0026104			
1/2 körívű fordított vágótű							
	45 zöld		C0026196		C0026198		
	45 zöld			C0026199	C0026200		
	45 zöld				C0026202		
	75 zöld				C0026420	C0026421	C0026223
3/8 körívű fordított vágótű							
	45 zöld	C0026171	C0026172				
	45 zöld		C0026176	C0026177			
	45 75 zöld		C0026551	C0026552	C0026553 C0026232	C0026554	
	75 zöld			C0026514	C0026515	C0026516	C0026517

MEMBRÁNOK ÉS VÉRZÉSCSILLAPÍTÓK

Lyoplant®

BIOLÓGIAI MEMBRÁN

LEÍRÁS

Lyoplant® tiszta kollagén implantátum, amely szarvasmarha pericardiumból készül. A speciális liofilizálási (fagyasztási-száritási) folyamat biztosítja a Lyoplant® laza szövetstruktúrájának megőrzését, ami optimális fibroblast sejtosztódást biztosít.

INDIKÁCIÓK

Idegsebészetben az összekötő szöveti struktúrák kipótlása, megnagyobbítása.

ELŐNYÖK

- Megelőzi a CFS-vesztést
- Felszívódó
- Kiváló szövetkompatibilitás
- Gyors és szabályos gyógyulás az autológ összekötő szövetekkel
- Jó kezelhetőség, gyors rehidráció, magas flexibilitás és alkalmazkodás az anatómiai struktúrákhoz



Méret	Db / csomag	Cikkszám
6 x 14 cm	1 darab	106 6021
4 x 10 cm	1 darab	106 6048
4 x 5 cm	2 darab	106 6064
2 x 10 cm	2 darab	106 6080
1,5 x 3 cm	2 darab	106 6102
6 x 8 cm	1 darab	106 6242

LEÍRÁS

A Lyostypt eredeti kollagén alapanyagú felszívódó vérzéscsillapító. A Lyostypt nagy felületű struktúrája ideális szerkezetet biztosít a vérlemezkék megtapadásához, és további segítséget biztosít véralvadáshoz.

INDIKÁCIÓK

A Lyostypt egy kollagén alapanyagú vérzéscsillapító, amely a következő területeken használható:

- Kapilláris vérzés
- Parenchyma vérzés
- Szivárgó sebvérzés
- Helyi vérzéscsillapítás dialízis során
- Kiegészítő vérzéscsillapítás egyéb vérzéscsillapítási eljárás mellett

ELŐNYÖK

- Teljes mértékben felszívódik
- A hatékony és gyors vérzéscsillapításnak köszönhetően alacsony vér- és idővesztés
- Hatékonyan tapad a vérző felszínhez
- Nem ragad a műszerhez és a kesztyűhöz



Méret	Db / csomag	Cikkszám
3 x 5 cm	12 darab	106 9128
5 x 8 cm	6 darab	106 9152
10 x 12 cm	4 darab	106 9209

Bone Wax

CSONTON BELÜLI MECHANIKUS VÉRZÉSCSILLAPÍTÓ

LEÍRÁS

A Bone Wax méhviasz (70%) és vazelin (30%) steril keveréke, amely megolvasztható és „kézmeleg” állapotban alkalmazható.

INDIKÁCIÓK

- Idegsebészet
- Ortopédia és traumatológia
- Mellkassebészet
- Fogászat, szájsebészet és állkapocssebészet

ELŐNYÖK

- Puha, könnyű formázni és applikálni
- Praktikus és átlátszó csomagolás



Db / csomag	Cikkszám
24 darab, mindegyik 2,5 gr.	102 9754

AESCULAP® KÉZIMŰSZEREK

EGYSZER HASZNÁLATOS STERIL SZIKÉK



BA 210



BA 211



BA 215



BA215-C

Db / csomag	Cikkszám
10 darab	BA 210
10 darab	BA 211
10 darab	BA 215
10 darab	BA 215-C

SZIKENYELEK ÉS STERIL SZIKEPENGÉK



BB 073 R
No. 3



BB 063 R
No. 3



BB084R
No. 4

Steril szikepengék
a No. 4 típusú szikenyélékhez



BB 520



BB 521



BB 522

Steril szikepengék
a No. 3 szikenyélhez



BB 512



BB 515



BB 515-C



BB 542

Db / csomag	Cikkszám
1 darab	BB 063 R
1 darab	BB 073 R
1 darab	BB 084 R
100 darab	BB 522
100 darab	BB 512

Db / csomag	Cikkszám
100 darab	BB 520
100 darab	BB 515
100 darab	BB 521
100 darab	BB 542
100 darab	BB 515-C

AESCULAP FOGÁSZATI MŰSZEREK

TŰFOGÓK*

DUROGRIP®

Az Aesculap tűfogó műszerek keményfémbevetés fogófelülettel érintkeznek az indikációhoz választott varróanyaggal.

A sima fogófelület, illetve a három különböző fogófelületi profil az adott tűhöz leginkább illeszkedő fogást biztosít.

- 3 év gyártói garancia



BM003R
DUROGRIP® tűfogó
USP: 4/0 – 6/0
Méret: 180 mm



BM013R
DUROGRIP® tűfogó
CRILE-WOOD
USP: 4/0 – 6/0
Méret: 145 mm



BM150R
DUROGRIP® tűfogó
MATHIEU
USP: 4/0 – 6/0
Méret: 170 mm



BM186R
DUROGRIP® tűfogó
TOENNIS
USP: 3/0-ig
Méret: 180 mm

OLLÓK*

DUROTIP®

A DUROTIP® sebészeti ollók keményfém vágóéllel rendelkeznek:

- 3 év gyártói garancia
- Aranyozott gyűrűk




BC210R
DUROTIP® olló
Forma: egyenes
Méret: 110 mm



BC211W
DUROTIP® olló
fogazott éllel
Forma: ívelt
Méret: 110 mm



BC157R
JOSEPH olló
Forma: ívelt
Méret: 150 mm

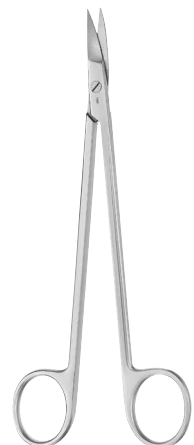

BC161R
KELLY olló
Forma: ívelt
Méret: 175 mm

*A termékek 1:3 méretarányban jelennek meg; míg a munkavégek részletes nézetei 1:1 méretarányban

CSIPESZEK*

A kiválóság új szintjét jelentő **ERGOPERIO** mikro-csipeszek:

- A henger alakú fogófelület lehetővé teszi az eszközök ujjheggyel történő elfordítását
- A középpontjukban kiegyensúlyozott műszerek



DX060R
ERGOPERIO
anatómiai csipesz
Forma: egyenes
Méret: 180 mm



DX070R
ERGOPERIO
atraumatikus csipesz
Forma: egyenes
Méret: 180 mm




DX080R
ERGOPERIO
sebészi csipesz
Forma: egyenes
Méret: 180 mm




További információt a szájsebészeti
eszköz kínálatról az Aesculap
Dental Katalógusban talál az alábbi
weboldalon:


www.aesculap-dental.com/de/prospekte.html

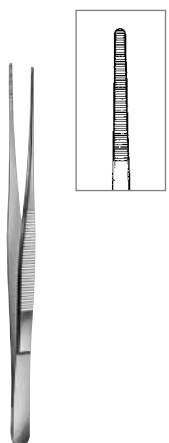


BD217R
anatómiai csipesz
Forma: egyenes
Méret: 155 mm

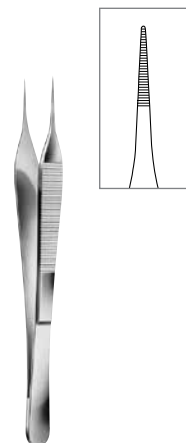

BD223R
MICRO ADSON
anatómiai csipesz
Forma: egyenes
Méret: 150 mm

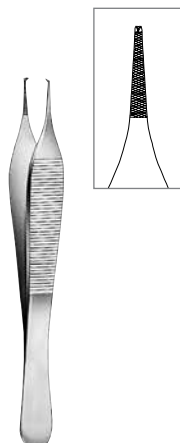

BD512R
MICRO ADSON
sebészi csipesz
Forma: egyenes
Méret: 150 mm

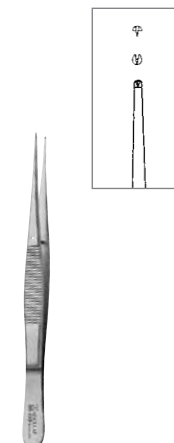

BD669R
SEMKEN
sebészi csipesz
Forma: egyenes
Méret: 145 mm

INFEKCIÓKONTROLL

FERTŐTLENÍTŐSZEREK

Kézhygiéné

LIFOSAN® SOFT ... egy klasszikus a B. Brauntól

Tulajdonságok

- Alkáli- és szappanmentes kéztisztító folyadék
- Friss, kellemes illat
- Bőrápoló összetevőinek köszönhetően mindennapos használatra is alkalmas
- Bőrsemleges pH-érték
- Nagyon jó bőrkompatibilitás
- Műteti bemosakodást megelőző tisztasági kézmosáshoz alkalmazható

Kiszerezési egység	Cikkszám
500 ml	18593
1000 ml	18595

LIFOSAN® PURE

Tulajdonságok

- Illatanyag- és színezékmentes kéztisztító folyadék
- Alkáli- és szappanmentes
- Remek habképződési jellemzők
- Kiváló minőségű bőrápoló összetevőket tartalmaz
- Professzionális egészségügyi és lakossági felhasználásra
- Műteti bemosakodást megelőző tisztasági kézmosáshoz alkalmazható
- Betegfürdetéshez is alkalmazható

Kiszerezési egység	Cikkszám
500 ml	19014
1000 ml	19015



SOFTA-MAN® ... egy klasszikus a B. Brauntól

Tulajdonságok

- Használatra kész alkoholos oldat higiénés kézfertőtlenítéshez és sebészi bemosakodáshoz
- Baktericid, fungicid, tuberkulocid, szelektív virucid hatásspektrum
- Színezékmentes
- Hipoallergén illatanyagot és bőrvédő adalékanyagot tartalmaz

Kiszerezési egység	Cikkszám
500 ml	19746
1000 ml	18440

NNK engedélyszám

36148-3/2020/JIF

SOFTA-MAN® VISCORUB

... gélállagú kézfertőtlenítő

Tulajdonságok

- Használatra kész alkoholos oldat higiénés kézfertőtlenítéshez és sebészi bemosakodáshoz
- Baktericid, tuberkulocid, fungicid, virucid hatású
- Illatanyag- és színezékmentes
- Kiváló bőrtolerancia

Kiszerezési egység	Cikkszám
100 ml	19632
500 ml	19629
1000 ml	19630

NNK engedélyszám

36145-3/2020/JIF

Hatásspektrum	Behatási idő
Higiénés kézfertőtlenítés (OTH)	30 mp
Higiénés kézfertőtlenítés (EN 1500)	15 mp
Sebészi bemosakodás (OTH)	5 x 1 perc
Sebészi bemosakodás (EN 12791)	60 mp



FERTŐTLENÍTŐSZEREK

Kézhygiéné

PROMANUM® PURE ... különleges bőrápoló összetétel

Tulajdonságok

- Használatra kész alkoholos oldat higiénés kézfertőtlenítéshez és sebészi bemosakodáshoz
- Baktericid, tuberkulocid, fungicid, virucid hatású
- Bőrápoló összetevőket tartalmaz
- Illatanyag- és színezékmentes
- Higiénés kézfertőtlenítés végrehajtása esetén (30 mp) hatékonyan véd az adenovírusokkal szemben

Kiszerezési egység	Cikkszám
500 ml	19727
1000 ml	19728

NNK engedélyszám

36140-3/2020/JIF

Hatásspektrum	Behatási idő
Higiénés kézfertőtlenítés (OTH)	30 mp
Higiénés kézfertőtlenítés (EN 1500)	15 mp
Sebészi bemosakodás (OTH)	5 x 1 perc
Sebészi bemosakodás (EN 12791)	90 mp
Bemosakodás előtt tisztasági kézmosás és szárazra törítés esetén (OTH)	2 x 1,5 perc



TRIXO® ... hagyományos bőrápolás a B. Brauntól

Tulajdonságok

- Olaj a vízben emulzió
- Színezékmentes
- Bőrsimleghes pH-érték
- Kellemes, lágy illatanyaggal
- Nem ragad
- Gyorsan felszívódik

Kiszerezési egység	Cikkszám
100 ml	18598
500 ml	18600



FERTŐTLENÍTŐSZEREK

Felületfertőtlenítés

MELISEPTOL® RAPID ... magas hatékonyság, gyors hatás

Leírás

- Egyszerűen használható – szórófejjel vagy kendő formájában
- Különösen gyors hatás
- Széles hatásspektrum
- Enyhe citrom illat
- Aldehydmentes
- Hatásspektrum:
baktericid, yeasticid/fungicid, tuberkulocid, szelektív virucid
- Behatási idők:
 - Baktericid, yeasticid, tuberkulocid, szelektív virucid (HBV, HCV, HIV, rota-, adenovírus) hatás: 5 perc
 - Fungicid hatás: 15 perc
 - Virucid hatás: 10 perc

Kiszerezés	Cikkszám
Hengerpalack, 1000 ml (szórófej nélkül)	19048
Műanyag kanna, 5000 ml	19049
Szórófej hengerpalackhoz	3908012

NNK engedélyszám

17920-3/2019/JIF

MELISEPTOL® HBV ... gyors és praktikus

Leírás

- Praktikus törölkendő fertőtlenítéshez –
1 perces behatási idővel
- Aldehydmentes
- Gazdaságos – utántöltő tasakkal
- Hatásspektrum:
baktericid, yeasticid/fungicid, tuberkulocid, szelektív virucid
- Behatási idők:
 - Baktericid, yeasticid, tuberkulocid, szelektív virucid (HBV, HCV, HIV, rota-, adenovírus) hatás: 5 perc
 - Fungicid hatás: 15 perc
 - Virucid hatás: 10 perc

Kiszerezés	Cikkszám
Adagoló doboz (100 db kendővel)	19096
Utántöltő tasak (100 db kendővel)	19097

NNK engedélyszám

17922-3/2019/JIF



FERTŐTLENÍTŐSZEREK

Felületfertőtlenítés

MELISEPTOL® FOAM PURE ... gyors és kíméletes

Leírás

- Alkoholra érzékeny felületekhez – ultrahangos szondákhoz is
- Szórása esetén nem képződik aeroszol
- Rövid behatási idő
- Dermatológiailag tesztelt
- Élelmiszeripari felhasználásra is alkalmas
- Hatásspektrum: baktericid, yeasticid, tuberkulocid, szelektív virucid
- Behatási idő: 5 perc

Kiszerelés	Cikkszám
Szórófejes palack, 750 ml	19797

NNK engedélyszám
17921-3/2019/JIF



MELISEPTOL® WIPES SENSITIVE

... a nagy értékű orvosi berendezések állagának megóvásához

Előnyök

- A puha, szőszmentes, gyapjú minőségű kendők megvédik a különösen érzékeny felületeket a karcolástól.
- A Meliseptol® Foam pure oldat nem károsítja az érzékeny felületeket. Az impregnáló oldat csekély mennyisége révén minimális az esélye a szer berendezésbe való beszivárgásának, továbbá a finom berendezések nyílásainak eltömítése is elkerülhető.
- Ultrahangos berendezések számos típusához használható.
- Hatásspektrum: baktericid, yeasticid, tuberkulocid, szelektív virucid
- Behatási idő: 5 perc

Kiszerelés	Cikkszám
Adagoló doboz (60 db kendővel)	19582
Utántöltő tasak (60 db kendővel)	19530

NNK engedélyszám
17923-3/2019/JIF



MELISEPTOL NEW FORMULA

... új összetétel a gyors felületfertőtlenítés érdekében

Előnyök

- Tökéletesített tisztítóhatás, fényes fémfelületeken is
- Kiegészítő antimikrobiális összetevők nélkül (mint pl. aldehidek, kvaterner-ammónium vegyületek)
- Kellemes, citromos illat
- Gyors és széleskörű hatásspektrum, többek között mykobaktericid és burok nélküli vírusokkal – rota-, adeno- és norovírus – szemben virucid
- Hatásspektrum: baktericid, yeasticid, tuberkulocid, szelektív virucid
- Behatási idő: 5 perc

Kiszerezés	Cikkszám
Hengerpalack, 1000 ml (szórófej nélkül)	19764
Téglapalack, 1000 ml (szórófej nélkül)	19761
Szórófej hengerpalackhoz	3908012

NNK engedélyszám
17917-3/2019/JIF



FALI ADAGOLÓK



FALI ADAGOLÓ MŰANYAG PUMPÁVAL

Tulajdonságok

- Alumíniumborítás
- Állítható adagolás: 0,5 ml – 1,5 ml
- A műanyag pumpa az összes B. Braun által gyártott kézmosó, kézfertőtlenítő és bőrápoló termékkel használható
- pH-semleges tisztítószerrel minden alkatrész tisztítható fertőtlenítő mosogatógépben
- 134°C-on és 3 bar nyomás alatt autoklávozható
- A műanyag pumpa nem autoklávozható



FALI ADAGOLÓ FÉMPUMPÁVAL

Tulajdonságok

- Alumíniumborítás
- Állítható adagolás: 0,5 ml – 1,5 ml
- A fém pumpa az összes B. Braun által gyártott kézmosó, kézfertőtlenítő és bőrápoló termékkel használható
- Minden alkatrész fertőtlenítő mosogatógépben tisztítható, autoklávozható 134 °C-on, 3 bar nyomás alatt

Előnyök:

- A pumpa cseréje az előlő oldalról lehetséges
- A műanyag pumpa is kompatibilis a Trixo® termékcsaláddal
- A borítás 134 °C-on autoklávozható

Kiszerelési egység	Cikkszám
500 ml-es palackhoz Karhosszúság: 100 mm	1418893
1000 ml-es palackhoz Karhosszúság: 100 mm	1418892
500 ml-es palackhoz Karhosszúság: 170 mm	1418894
1000 ml-es palackhoz Karhosszúság: 170 mm	1418895

Kiszerelési egység	Cikkszám
500 ml-es palackhoz Karhosszúság: 100 mm	4400010
1000 ml-es palackhoz Karhosszúság: 100 mm	4400009A
500 ml-es palackhoz Karhosszúság: 170 mm	4400114
1000 ml-es palackhoz Karhosszúság: 170 mm	4400115

A garanciális feltételek csak B. Braun termékek használata esetén érvényesek.



LCP | FOLYÉKONYSZAPPAN- ÉS FERTŐTLENÍTŐSZER-ADAGOLÓ

Tulajdonságok

- Folyékonyszappan- és fertőtlenítőszer-adagoló műanyag borítással, rozsdamentes acél adagoló karral, cserélhető műanyag pumpával, egyszer használatos palackokhoz.
- Használható maró hatóanyagoktól mentes szappanokkal, valamint alkoholos kézfertőtlenítővel.
- Ne használja Trixo® vagy Trixo®-lind termékekkel!

Kiszerelési egység	Cikkszám
500 ml-es palackhoz	1413675
1000 ml-es palackhoz	1413955



FALI KAROS ADAGOLÓ MŰANYAG PUMPÁVAL ÉS SZÁMLÁLÓVAL

Tulajdonságok

- A beépített számláló megbízhatóan méri az elvégzett kézfertőtlenítő eljárások számát
- Alumíniumborítás
- Állítható adagolás: 0,5 ml – 1,5 ml
- A számláló kivételével minden alkatrész tisztítható fertőtlenítő mosogatógépben pH-semleges tisztítószerrel
- A műanyag pumpa és a számláló kivételével minden alkatrész autoklávozható

Kiszerelési egység	Cikkszám
500 ml-es palackhoz Karhosszúság: 170 mm	4400116
1000 ml-es palackhoz Karhosszúság: 170 mm	4400117



ÉRINTÉSMENTES ADAGOLÓ CSEPPFOGÓ TÁLCÁVAL


Tulajdonságok

- Szenzoros adagoló, a kézhigiéniai gyakorlat javítása érdekében
- Az összes B. Braun által forgalmazott szappanhoz, fertőtlenítőhöz, bőrápoló termékhez alkalmazható
- Autoklávozható (max. 123 °C)
- Karcolásnak ellenálló, eloxált alumíniumborítás
- Elemmel működik
- Adagolókkal ellátva (üzembiztonság érdekében)
- Állítható adagolás: 0,75 ml – 1,5 ml
- Csepptálcát tartalmaz

Kiszerelési egység	Cikkszám
500 ml-es palackhoz	4400774
1000 ml-es palackhoz	3908403

EGYSZER HASZNÁLATOS FOGYÓESZKÖZÖK

MINDEN RÉSZLETÉBEN MEGFELEL A GYAKORLATNAK

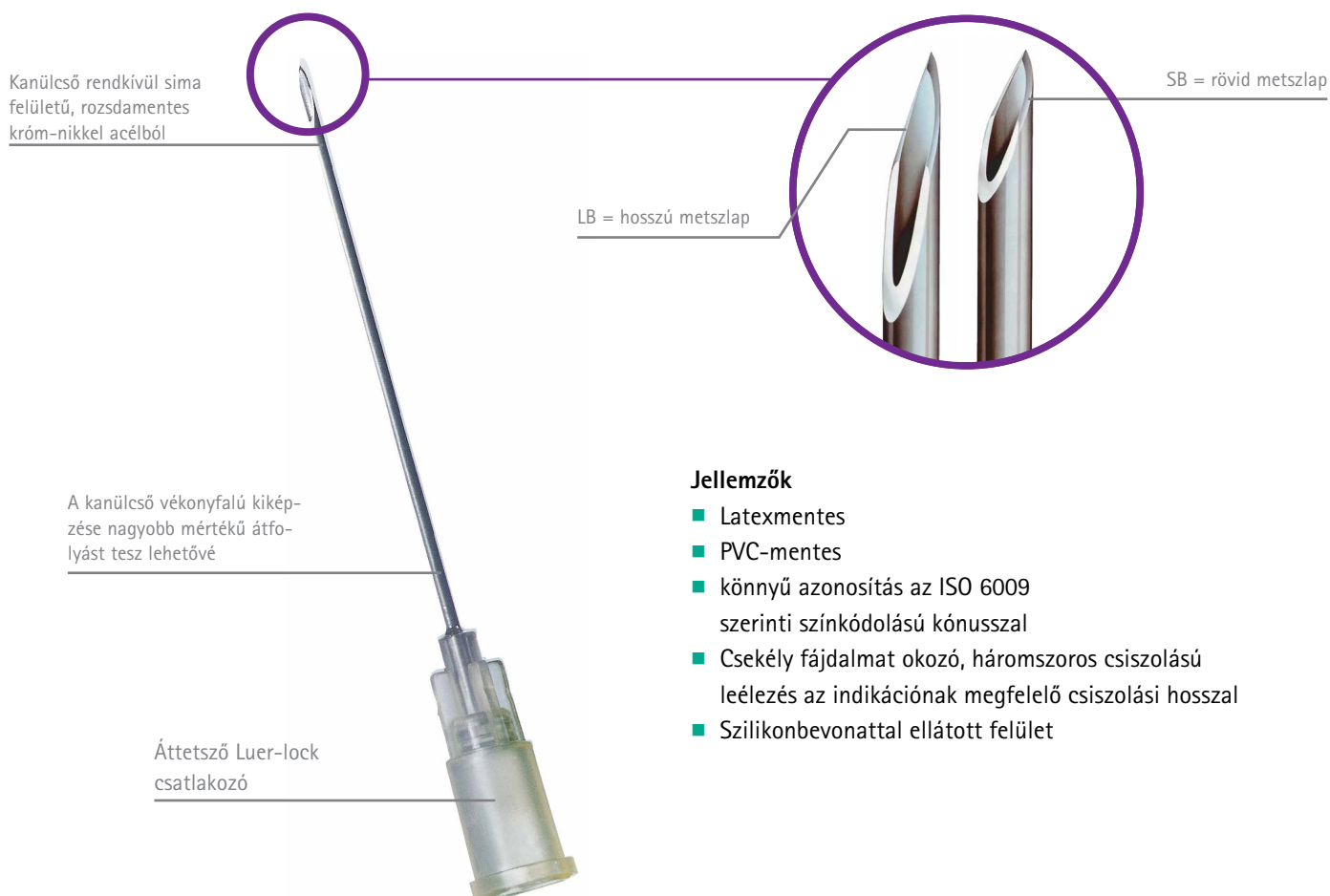

Jellemzők

- Latexmentes
- PVC-mentes
- könnyű azonosítás az ISO 6009 szerinti színkódolású kónusszal
- Csekély fájdalmat okozó, háromszoros csiszolású leélezés az indikációnak megfelelő csiszolási hosszal
- Szilikonbevonattal ellátott felület

STERIL INJEKCIÓS TŰK STANDARD MÉRETEKBEN

Sterican® Egyszer használatos tűk az ISO 7864 és a DIN 13097 szerint

Tű/Színkód	Tűméret	Ø mm	Hossz mm	Metszlap	Indikációk	Cikkszám
 Fekete	22 G x 1 1/4"	0,70	30	LB	i.v., i.m. kis mennyiségek	4657624
 Kék	23 G x 1 1/4"	0,60	30	LB	i.v., i.m. kis mennyiségek	4657640
 Kék	23 G x 1"	0,60	25	LB	i.v., i.m. kis mennyiségek	4657667
 Lila	24 G x 1"	0,55	25	LB	i.v., s.c., kézvéna, gyermekgyógyászat	4657675
 Barna	26 G x 1"	0,45	25	LB	i.v., s.c., kézvéna, gyermekgyógyászat	4657683
 Szürke	27 G x 3/4"	0,40	20	LB	i.v., s.c.	4657705

STERIL INJEKCIÓS TŰK FOGÁSZATI ÉRZÉSTELENÍTÉSHEZ

Sterican® Egyszer használatos fogászati tűk az ISO 7864 és a DIN 13097 szerint						
Tű/Színkód	Tűméret	Ø mm	Hossz mm	Metsz lap	Indikációk	Cikkszám
 Narancs	25 G x 1½"	0,50	40	LB	Alsó-felső állkapocs, regionális anesztézia	9186166
 Szürke	27 G x 1½"	0,40	40	LB	Alsó-felső állkapocs, regionális anesztézia	9186182
 Narancs	25 G x 1"	0,50	25	LB	Infiltrációs anesztézia a felső állkapocs és az elülső fogak területén	9186158
 Szürke	27 G x 1"	0,40	25	LB	Az idegi tartományban végzett érzéstelenítéshez	9186174

Sterican® Egyszer használatos tűk speciális indikációkhoz az ISO 7864 és a DIN 13097 szerint							
Tű/Színkód		Tűméret	Ø mm	Hossz mm	Metsz lap	Indikációk	Cikkszám
	Barna	26 G x 1/2"	0,45	12	LB	Inzulin	4665457
	Szürke	27 G x 1/2"	0,40	12	LB	Inzulin	4665406
	Sárga	30 G x 1/2"	0,30	12	LB	Inzulin	4656300
	Narancs	25 G x 5/8"	0,50	16	LB	Heparin/Tuberkulin	4657853

Minden injekciós tű eladási egysége: egy karton – 100 darab (egyenként sterilen csomagolva)

Jellemzők

- Kitűnően átlátszó henger
- Fekete beosztás
- Ideális leolvashatóság
- Törésálló
- A névleges térfogaton túl meghosszabbított beosztás
- Minimális maradéktérfogat
- Biztonságos dugattyú-megállás
- Latexmentes/PVC-mentes
- Szilikonolaj-mentes



Injekt Luer csatlakozó	Skálabeosztás léptéke	Kónusz	Cikkszám
2 ml használható 3 ml-ig	0,1 ml	centrikus	4606027 V
5 ml használható 6 ml-ig	0,2 ml	excentrikus	4606051 V
10 ml használható 12 ml-ig	0,5 ml	excentrikus	4606108 V
20 ml használható 24 ml-ig	1,0 ml	excentrikus	4606205 V

Injekt Luer-lock csatlakozó	Skálabeosztás léptéke	Kónusz	Cikkszám
2 ml használható 3 ml-ig	0,1 ml	centrikus	4606701 V
5 ml használható 6 ml-ig	0,2 ml	centrikus	4606710 V
10 ml használható 12 ml-ig	0,5 ml	centrikus	4606728 V
20 ml használható 24 ml-ig	1,0 ml	centrikus	4606736 V

Jellemzők

- Kitűnően átlátszó henger
- Fekete beosztás
- Ideális leolvashatóság
- Törlésálló
- Könnyen csúszó dugattyúfej dupla tömítőgyűrűvel
- Minimális maradéktérfogat
- Biztonsági dugattyúfék
- Latexmentes, PVC-mentes
- Omnifix®-F beosztás 0,01 ml



Omnifix® Luer csatlakozó	Skálabeosztás léptéke	Kónusz	Cikkszám
1 ml	0,01 ml	centrikus	9161406 V
3 ml	0,1 ml	centrikus	4616025 V
5 ml	0,2 ml	excentrikus	4616057 V
10 ml	0,5 ml	excentrikus	4616103 V
20 ml	1,0 ml	excentrikus	4616200 V
30 ml	1,0 ml	excentrikus	4616308 F
50 ml	1,0 ml	excentrikus	4616502 F

Minden fecskendő eladási egysége: 1 karton – 100 darab (egyenként sterilen csomagolva)

Omnifix® Luer-lock csatlakozó	Skálabeosztás léptéke	Kónusz	Cikkszám
3 ml	0,1 ml	centrikus	4617022 V
5 ml	0,2 ml	centrikus	4617053 V
10 ml	0,5 ml	centrikus	4617100 V
20 ml	1,0 ml	centrikus	4617207 V
30 ml	1,0 ml	centrikus	4617304 F
50 ml	1,0 ml	centrikus	4617509 F

JEGYZETEK

B. Braun Trading Kft. | 1023 Budapest, FelhÉvízi u. 5.
Tel.: +36 (1) 346 9700 | Fax: +36 (1) 438 4900
www.bbraun.hu | www.facebook.com/BBraunHU/