



PROFESSZIONÁLIS FOGÁSZATI ANYAGOK


TARTALOM

4	SAFIL®	27	SOFTA-MAN®
6	MONOSYN®	28	PROMANUM® PURE
8	PREMILENE®	29	TRIXO®
10	DAFILON®	30	BRAUNOL®
12	SILKAM®/VIRGIN SILK	31	MELISEPTOL® RAPID
14	SUPRAMID®	32	MELISEPTOL® HBV
16	PREMICRON®	33	MELISEPTOL® FOAM PURE
18	LYOPLANT®	34	MELISEPTOL® WIPES SENSITIVE
19	OSTEOVIT®	35	FALI KAROS ADAGOLÓK
20	LYOSTYPT®	36	FALI TARTÓK
21	BONE WAX	37	ADAGOLÓPUMPÁK
22	GELITA	38	EGYSZER HASZNÁLATOS STERICAN® TŰK
24	EGYSZER HASZNÁLATOS STERIL SZIKÉK	40	INJEKT
25	SZIKENYELEK ÉS STERIL SZIKEPENGÉK	41	OMNIFIX®
26	LIFOSAN® SOFT	42	MEDIBOX®

A KÜLÖNBÖZŐ TÍPUSÚ TŰK BEAZONOSÍTÁSA A B. BRAUN NOMENKLATÚRÁK ALAPJÁN

A	B	C	D
Tű görbületének íve	Tűtest formája	Tűhegy	Tűtípus
S 1/8-os ívű	R kör	T trokár hegyű	s erősített tűtest
V 1/4-es ívű	S vágó	N tompa hegyű	ss extra erősített tűtest
D 3/8-os ívű		S vágóhegyű körtű	v letörhető tűtest
H 1/2-es ívű		C rövid vágóhegy	
F 5/8-os ívű		M mikrohegy	
G egyenes		MP plasztikai minőségű vágótű	
P progresszív görbület		m mikrotű	
J horog			
SK sítalpú tű			

A tű görbületének íve

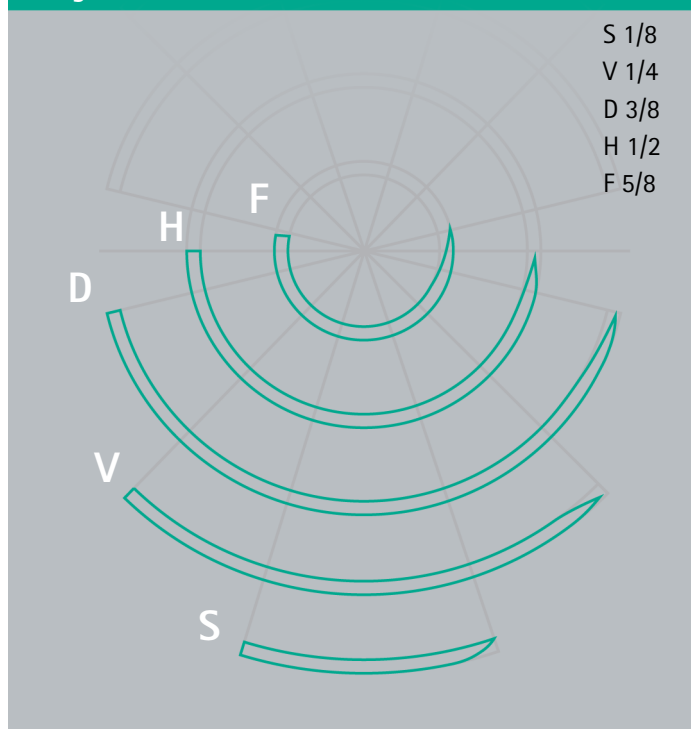

A varróanyag rendelési számában
szereplő betűjelzések magyarázata

B	24 db/doboz
C	36 db/doboz
G	12 db/doboz

Leírás

A Safil® közepes idő alatt felszívódó fonott és bevonattal ellátott, tiszta poliglikolsavból készült szintetikus varróanyag. A Safil® hidrolízis útján bomlik le, előre tervezhető és megbízható felszívódást biztosít.

Tulajdonságok


- Az eredeti szakítószilárdság 50%-a 18 nap után is megmarad
- Teljes felszívódás 60-90 nap között

Indikációk

- Hasi sebészet
- Nőgyógyászat/Szülészet
- Szemsebészet
- Ortopédia
- Urológia
- Bőrzárás (intra, sub, felszíni)
- Idegsebészet
- Lékötések

Előnyök

- Magas kezdő szakítószilárdság
- Kiváló csomózhatóság
- Egyenletes, sima áthaladás a szöveteken
- Könnyű kezelhetőség

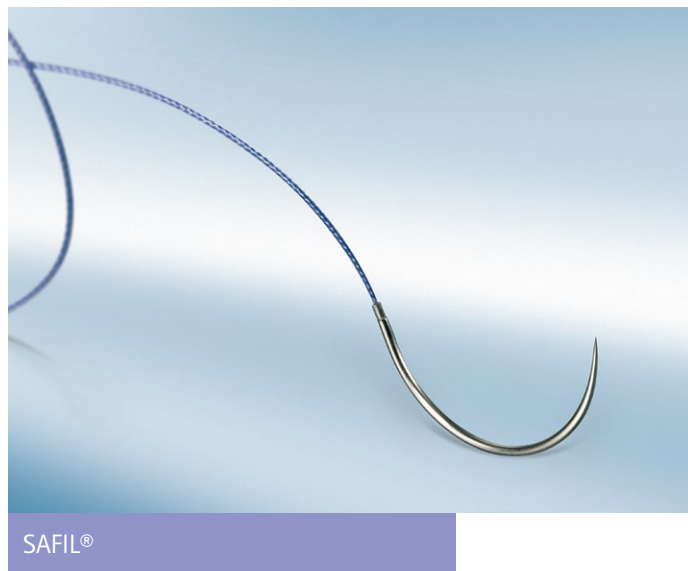

Termékáttekintés	
Szerkezet	Fonott
Szín	Színezetlen vagy lila
Kémiai összetétel	Poliglikolsav
Bevonat	Glikonát
Alapanyag	Szintetikus
Méret	USP 2-8/0(fonott) USP 9/0-10/0 (monofil)
Felszívódás típusa	Hidrolízis által
Sterilizálás	ETO

Tű	Fonal	USP metrikus							
hosszúság (mm)	hosszúság (cm) szín	6/0 0,7	5/0 1	4/0 1,5	3/0 2	2/0 3	0 3,5	1 4	2 5
1/2 körtű									
 HR 17	70 lila	C1048011	C1048012	C1048013	C1048014	C1048015			
 HR 22	70 lila		C1048028	C1048029	C1048030	C1048031	C1048032		
 HR 26	70 90 lila			C1048040 C1048540	C1048041 C1048541	C1048042 C1048542	C1048043 C1048543	C1048044 C1048544	
3/8 körtű									
 DR 18	70 lila			C1048150	C1048151				
 DR 26	70 lila				C1048164	C1048165			
1/2 görbületű fordított vágótű									
 HS 15	45 70 lila	C1048202	C1048203	C1048204 C1048250					
 HS 21	45 lila			C1048225	C1048226				
 HS 23	45 70 lila				C1048230 C1048430	C1048431			
 HS 26	70 lila				C1048241	C1048242	C1048243		
3/8 görbületű fordított vágótű									
 DS 16	45 70 lila		C1048212	C1048213 C1048513	C1048214 C1048514				
 DS 19	45 70 lila		C1048219 C1048419	C1048220 C1048420	C1048221 C1048421				
 DS 24	70 lila			C1048234	C1048235	C1048236	C1048237		

MONOSYN®

Felszívódó varróanyag

Leírás

A Monosyn® közepes idő alatt felszívódó, glikonátból készült szintetikus monofil varróanyag, amely kapható színezetlen változatban felületi sebek zárásához, illetve lila színben egyéb alkalmazásokhoz. A Monosyn® kiváló kezelési tulajdonságokkal rendelkezik és biztos csomózást tesz lehetővé. A Monosyn® minden fajta lágy szövethez javasolt.

Tulajdonságok


- Az eredeti szakítószilárdság 50%-a 14 nap után is megmarad
- Teljes felszívódás 60-90 nap között

Indikációk

- Hasi sebészet
- Nőgyógyászat/Szülészet
- Urológia
- Plasztikai és rekonstruktív sebészet
- Bőrzárás (intra, sub, felszíni)
- Lékötések

Előnyök

- Magas kezdő szakítószilárdság
- Ideális a lágy szövetekhez
- Kiváló csomózhatóság
- Egyenletes, sima áthaladás a szöveteken
- Gyors felszívódás

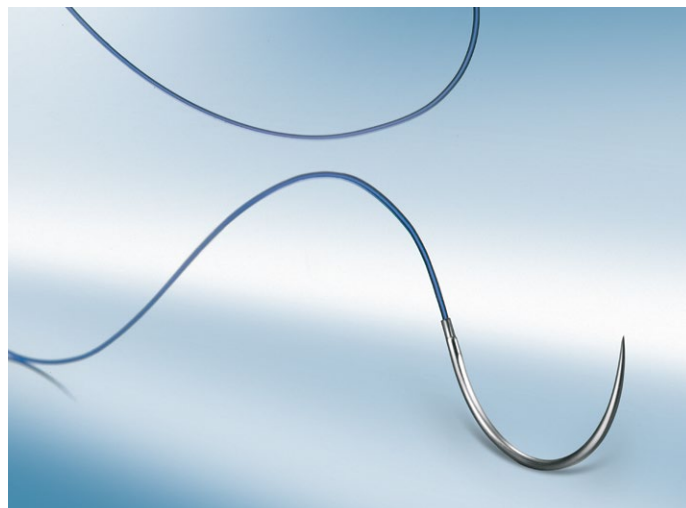

MONOSYN®

Termékáttekintés

Szerkezet	Monofil
Szín	Színezetlen vagy lila
Kémiai összetétel	Glikonát
Bevonat	Bevonat nélküli
Alapanyag	Szintetikus
Méret	USP 6/0 (0,7 m) –től USP 1(4 m)
Felszívódás típusa	Hidrolízis által
Sterilizálás	ETO

Tű	Fonal	USP metrikus							
hosszúság (mm)	hosszúság (cm) szín	6/0 0,7	5/0 1	4/0 1,5	3/0 2	2/0 3	0 3,5	1 4	2 5
1/2 körtű									
 HR 13	70 lila	C0022007	C0022008						
 HR 17	70 lila	C0022002	C0022003	C0022004	C0022005				
 HR 22	45 70 lila		C0022413	C0022014	C0022015	C0022016			
 HR 26	70 90 lila			C0022024	C0022025 C0022425	C0022026 C0022426	C0022027	C0022028	
3/8 körtű									
 DR 18	70 lila			C0022094					
1/2 görbületű fordított vágótű									
 HS 23	70 színezetlen			C0023224	C0023225	C0023226			
 HS 26	70 színezetlen					C0023240			
3/8 görbületű fordított vágótű									
 DS 12	70 színezetlen		C0023413						
 DS 16	70 lila		C0023423	C0023424	C0023425				
 DS 19	45 70 színezetlen			C0023204 C0023404	C0023205 C0023405				
 DS 24	70 lila				C0023215	C0023216			
Vágott fonal									
3 db 45 cm-es szál	3 x 45				C0020005	C0020006	C0020007	C0020008	
1 db 140 cm-es szál	1 x 140				C0020035	C0020036	C0020037	C0020038	
Ligatúra orsó									
1 db 250 cm-es szál	1 x 250					G0020046	G0020047	G0020048	

PREMILENE®

Nem felszívódó varróanyag

Leírás

A Premilene® szintetikus polipropilénből készült monofil varróanyag, amely a jó láthatóság érdekében kék színben kapható. A Premilene® varróanyag indikációja az általános lágy szövethézártás és/vagy -lekötés, beleértve a kardiovaszkuláris, szemészeti és neurológiai eljárásoknál való felhasználást is.

Indikációk

- Érsebészet
- Szívsebészet
- Plasztikai és rekonstrukciós sebészet
- Bőrhézártás (intra, sub, felszíni)
- Idegsebészet
- Mikrosebészet
- Hasi sebészet

Előnyök



- Egyenletes, sima áthaladás a szöveteken
- Kiváló csomóhezártás-biztonság
- Szövetek minimális gyulladártásos reakciója
- Páratlan erősség
- Optimális elasztikusság és nyújthatóság



PREMILENE®

Termékáttekintés

Szerkezet	Monofil
Szín	Kék
Kémiai összetétel	Polipropilén
Bevonat	Bevonat nélküli
Alapanyag	Szintetikus
Méret	USP 10/0 (0,2 m) –től USP 2-ig (5 m)
Felszívódás típusa	Nem felszívódó
Sterilizálás	ETO

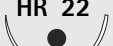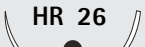Tű	Fonal	USP metrikus							
hosszúság (mm)	hosszúság (cm) szín	6/0 0,7	5/0 1	4/0 1,5	3/0 2	2/0 3	0 3,5	1 4	2 5
3/8 görbületű fordított vágótű									
DR 12 	75	C0090529	C0090530	C0090531					
DR 18 	75			C0090120					
1/2 görbületű fordított vágótű									
HS 26 	75				C0090269	C0090270			
3/8 görbületű fordított vágótű									
DS 12 	45	C0090206	C0090207	C0090208	C0090205				
DS 16 	45	C0090211	C0090212	C0090213					
DS 19 	45 75		C0090219 C0090519	C0090220 C0090520	C0090221 C0090521				
DS 24 	45 75			C0090434 C0090234	C0090435 C0090235	C0090436 C0090236	C0090237		
1/2 körtű									
HR 13 	75		C0090500						
HR 17 	75		C0090012	C0090013	C0090014				
HR 22 	75			C0090029	C0090030				
HR 26 	75			C0090040	C0090041	C0090042	C0090043		

DAFILON®

Nem felszívódó varróanyag

Leírás

A Dafilon® szintetikus, polimerekből készült nem felszívódó monofil varróanyag, Poliamid 6/6.6 (kék), Poliamid 6.6 (fekete) vagy Poliamid 6 (színezetlen). A kék Dafilon® és a színezetlen Dafilon® a felületi sebek zárásához és plasztikai sebészetben használható. A fekete Dafilon® a mikrosebészetben és szemészeti célokra használható. Mint minden szintetikus varróanyag, ez sem szívódik fel, azonban idővel fokozatosan elveszítheti szakítószilárdságát

Indikációk

- Bőrzárás (intra, sub, felszíni)
- Plasztikai és rekonstrukciós sebészet
- Mikrosebészet
- Szemsebészet
- Idegsebészet

Előnyök

- Flexibilitás, könnyű kezelhetőség
- Egyenletes és sima áthaladás a szöveteken
- Kiváló szövetkompatibilitás



Termékáttekintés	
Szerkezet	Monofil 
Szín	Kék, fekete és színezetlen
Kémiai összetétel	Poliamid
Bevonat	Bevonat nélküli
Alapanyag	Szintetikus
Méretek	USP 11/0 (0,1 m) –től USP 1–ig (4 m)
Felszívódás típusa	Nem felszívódó
Sterilizálás	Gamma sterilizálás / ETO (mikrosebészet 7/0 tól 11/0-ig)

Tű	Fonal	USP metrikus							
hosszúság (mm)	hosszúság (cm) szín	6/0 0,7	5/0 1	4/0 1,5	3/0 2	2/0 3	0 3,5	1 4	2 5
3/8 görbületű fordított vágótű									
 HS 21	90 kék			C0932876	C0932884				
 HS 26	75 90 kék				C0932957	C0935964			
1/2 görbületű fordított vágótű									
 DS 12	45 kék	C0932060	C0932078	C0932086					
 DS 16	45 75 kék	C0932116	C0932124 C0935123	C0932132 C0935131	C0932140 C0935107				
 DS 19	45 75 kék		C0932191 C0935190	C0932205 C0935204	C0932213 C0935212	C0932221			
 DS 24	45 75 kék			C0932345 C0935344	C0932353 C0935352	C0932361 C0935360	C0935379		
	90 kék				C0935328	C0935336			

SILKAM®/VIRGIN SILK

Nem felszívódó varróanyag

Leírás


A Silkam® nem felszívódó, sodrott és bevonattal ellátott varróanyag természetes selyemszálakból készül. A Silkam® elsősorban olyan esetekben alkalmazható, ahol a sebészeti gyakorlat szerint nem felszívódó varróanyagot kell használni. A Silkam® fekete színben kapható. A Virgin silk nem felszívódó, természetes selyemszálakból készített sodrott varróanyag, amely szemészeti műtétekhez, lágy szövetekhez javasolt, és kék színben kapható.

Indikációk

- Általános sebészet
- Bőrzárás (intra, sub, felszíni)
- Szájsebészet
- Szemsebészet (Virgin silk)
- Idegsebészet
- Lekötések

Előnyök

- Kiváló kezelhetőség
- Jó csomóbiztonság

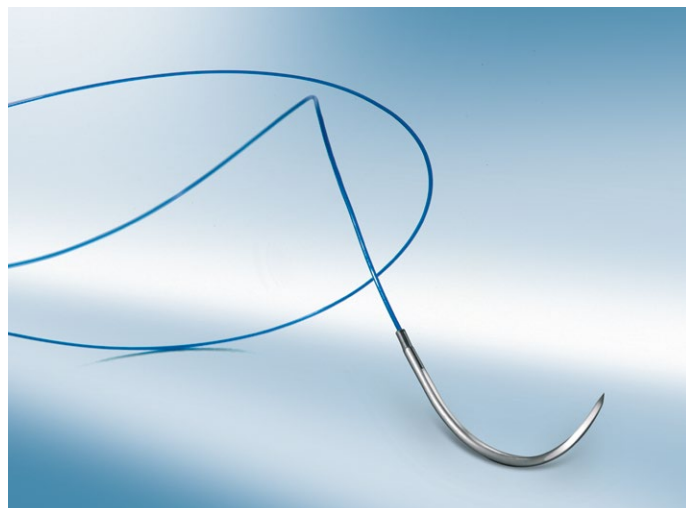

SILKAM®/VIRGIN SILK

Termékáttekintés

Szerkezet	Fonott (Silkam) Sodrott (Virgin silk) 
Szín	Kék (Virgin silk) vagy fekete (Silkam)
Kémiai összetétel	Természetes selyemszálak
Bevonat	Wax (viasz) és szilikon (Silkam), bevonat nélküli (Virgin silk)
Alapanyag	Selyemhernyó lárvagubója
Méret	USP 9/0 (0,3 m) –től USP 6–ig (8 m)
Felszívódás típusa	Nem felszívódó
Sterilizálás	Gamma sterilizálás (Silkam) / ETO (Virgin silk)

Tű	Fonal	USP metrikus							
hosszúság (mm)	hosszúság (cm) szín	6/0 0,7	5/0 1	4/0 1,5	3/0 2	2/0 3	0 3,5	1 4	2 5
1/2 körtű									
	75		C0760129	C0760137	C0760145	C0760153			
	75			C0760293	C0760307	C0760315			
	75			C0760404	C0760412	C0760420			
3/8 körtű									
	45			C0761133					
	75				C0761214				
1/2 görbületű fordított vágótű									
	45 75		C0762032 C0765490	C0762040	C0762059				
	45 75			C0762253 C0764825	C0762261 C0764248	C0764175			
	45				C0762300	C0762326			
	75			C0762407	C0762415	C0762423			
3/8 görbületű fordított vágótű									
	45 75		C0762075 C0765074	C0762083	C0762091				
	45 75	C0762113	C0762121 C0764124	C0762130 C0764132	C0762148 C0764140	C0764159			
	45 75		C0762199	C0762202	C0762210 C0765210	C0765228			
	75				C0762350	C0762369			

SUPRAMID®

Nem felszívódó varróanyag

Leírás

A Supramid szintetikus, nem felszívódó, poliamidból készült varróanyag, amely a fonal átmérőjétől függően kétféle kialakításban kapható:


- Supramid pseudo-monofil poliamid-6.6 szál poliamid-6 bevonattal, USP 3 - 4/0 méretben
- Supramid monofil varróanyag poliamid-6-ból készült, USP 5/0 - 6/0 méretben.

Indikációk

- Bőrzárás (intra, sub, felszíni)

Előnyök

- Kiváló kezelhetőség a monofil és polifil fonalak tulajdonságainak köszönhetően
- Sima, egyenletes felület az atraumatikus szövetegyesítéshez
- Könnyű eltávolítás
- Alacsony szöveti reakció

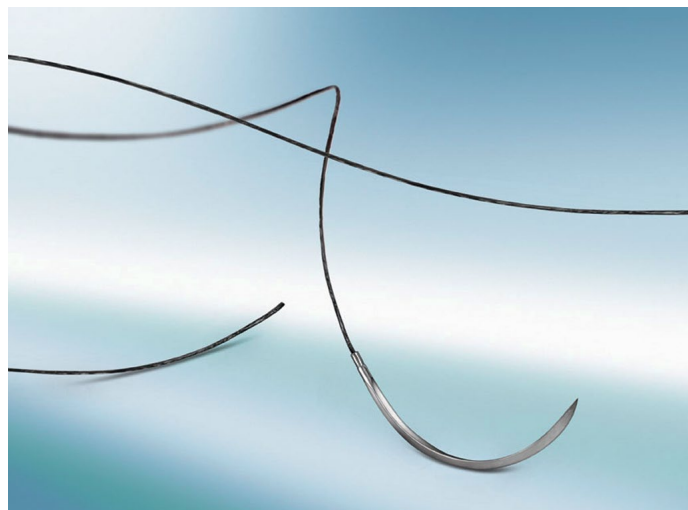

SUPRAMID®

Termékáttekintés

Szerkezet	Monofil (USP 5/0-6/0) Pseudo-monofil (USP 5/0-4/0)
Szín	Fehér vagy fekete
Kémiai összetétel	Poliamid
Bevonat	Bevonat nélküli
Méretek	USP 6/0 (0,7 m) –től USP 3-ig (6 m)
Felszívódás típusa	Nem felszívódó
Sterilizálás	Gamma sterilizálás

Tű	Fonal	USP metrikus							
hosszúság (mm)	hosszúság (cm) szín	6/0 0,7	5/0 1	4/0 1,5	3/0 2	2/0 3	0 3,5	1 4	2 5
1/2 görbületű fordított vágótű									
HS 15 	45 fekete			C0712043	C0712051				
HS 21 	45 fekete			C0712256	C0712264				
HS 23 	45 fekete				C0712302				
HS 26 	75 fekete				C0712418				
1/2 görbületű fordított vágótű									
DS 12 	45 fekete	C0712060	C0712078	C0712086					
DS 16 	45 fekete		C0712124	C0712132	C0712140				
DS 19 	45 75 fekete		C0712191	C0712205 C0714208	C0712213 C0714216	C0712221			
DS 24 	45 75 fekete			C0712345	C0712353 C0714356	C0712361 C0714364	C0712370		

PREMICRON®

Nem felszívódó varróanyag

Leírás


A PremiCron® szintetikus, nem felszívódó, poliészter szálakból készült, fonott multifil varróanyag. A PremiCron® egyenletes szilikonbevonattal rendelkezik, amely növeli a felület síkosságát, és ezáltal a fonal kezelhetősége is javul. Kapható egyes csomagolásban (1, 2 varróanyag) vagy multi csomagban (4, 8 varróanyag), zöld és fehér színben egyaránt.

Indikációk

- Szívsebészet
- Ortopédia

Előnyök


- Továbbfejlesztett atraumatikus szövetegyesítés
- Kiváló csomólevezetés
- Optimális csomózhatóság

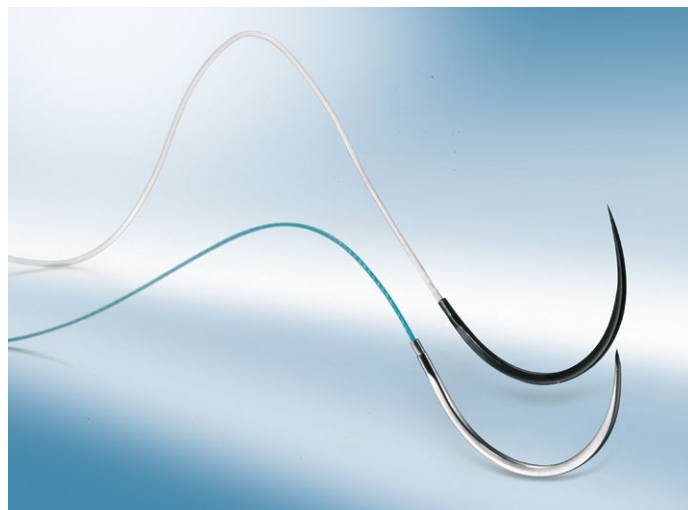

PREMI CRON®

Termékáttekintés

Szerkezet	Fonott
Szín	Zöld vagy fehér
Kémiai összetétel	Poliészter
Bevonat	Szilikon
Méretek	USP 6/0 (0,7 m) –től USP 5-ig (7 m)
Felszívódás típusa	Nem felszívódó
Sterilizálás	Gamma sterilizálás/ ETO

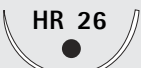Tű	Fonal	USP metrikus							
hosszúság (mm)	hosszúság (cm) szín	6/0 0,7	5/0 1	4/0 1,5	3/0 2	2/0 3	0 3,5	1 4	2 5
1/2 körtű									
HR 13 	45 zöld		C0026029	C0026030					
HR 17 	75 zöld		C0026003	C0026004	C0026005	C0026006			
HR 22 	75 zöld			C0026024	C0026025	C0026026			
HR 26 	75 zöld			C0026014	C0026015	C0026016	C0026017		
3/8 körtű									
DR 18 	75 zöld			C0026104					
1/2 görbületű fordított vágótű									
HS 15 	45 zöld		C0026196	C0026197	C0026198				
HS 21 	45 zöld			C0026199	C0026200				
HS 23 	45 zöld				C0026202				
HS 26 	75 zöld				C0026420	C0026421	C0026223		
1/2 körtű									
DS 16 	45 zöld		C0026176	C0026177					
DS 19 	45 75 zöld		C0026551	C0026552 C0026231	C0026553 C0026232	C0026554			
DS 24 	75 zöld			C002654	C0026515	C0026516	C0026517		

LYOPLANT®

Biológiai membrán

Leírás


Lyoplant® tiszta kollagén implantátum, amely szarvasmarha pericardiumból készül. A speciális liofilizálási (fagyasztási-száritási) folyamat biztosítja, hogy megőrződik a Lyoplant® laza szövetstruktúrája, ami optimális fibroblast sejtosztódást biztosít.

Indikációk

Idegsebészetben az összekötő szöveti struktúrák kipótlása, megnagyobbítása.

Előnyök

- Megelőzi a CFS-vesztést
- Felszívódó
- Kiváló szövetkompatibilitás
- Gyors és szabályos gyógyulás az autológ összekötő szövetekkel
- Jó kezelhetőség, gyors rehidráció, magas flexibilitás és alkalmazkodás az anatómiai struktúrákhoz

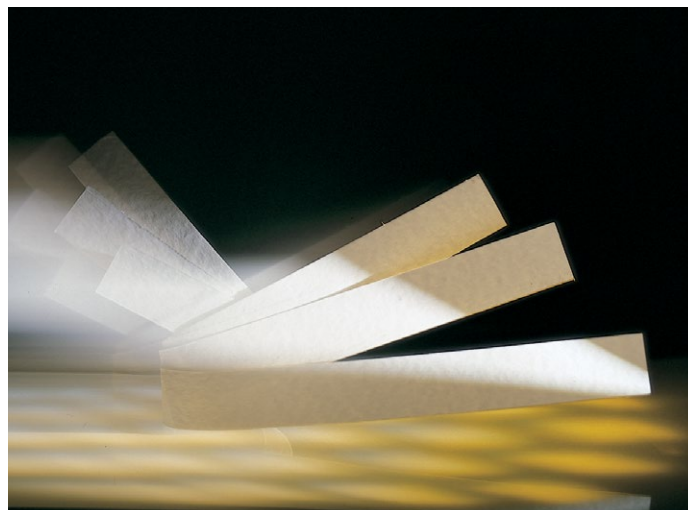

LYOPLANT®

Méret	Db / csomag	Cikkszám
6 x 14 cm	1 darab	106 6021
4 x 10 cm	1 darab	106 6048
4 x 5 cm	2 darab	106 6064
2 x 10 cm	2 darab	106 6080
1,5 x 3 cm	2 darab	106 6102
6 x 8 cm	1 darab	106 6242

OSTEOVIT®

Kollagén mátrix csontpótló

Leírás

Az Osteovit® bovin spongiosa eredetű porózus kollagén mátrix, ami teljesen felszívódik.


Indikációk

Tumoreltávolítás és cystectomy után a csonthiány feltöltésére:

- Ortopédiában
- Maxillo-faciális sebészetben
- Fogászat- szájsébszetben fogeltávolítás utáni alveolus-feltöltésnél, augmentáció arcüreg-emelésnél, gyökércsúcs-amputáció utáni üregfeltöltésnél, maxilla-és mandibula-cysta eltávolításnál, retinált fogak eltávolítása után

Előnyök

- Felszívódó
- Jó szövetkompatibilitás
- A porózus kollagén struktúra elősegíti a szövet beágyazódását.
- Az Osteovit alakja könnyen hozzáigazítható a csontüreghez
- Autológ csontszövetpótlás

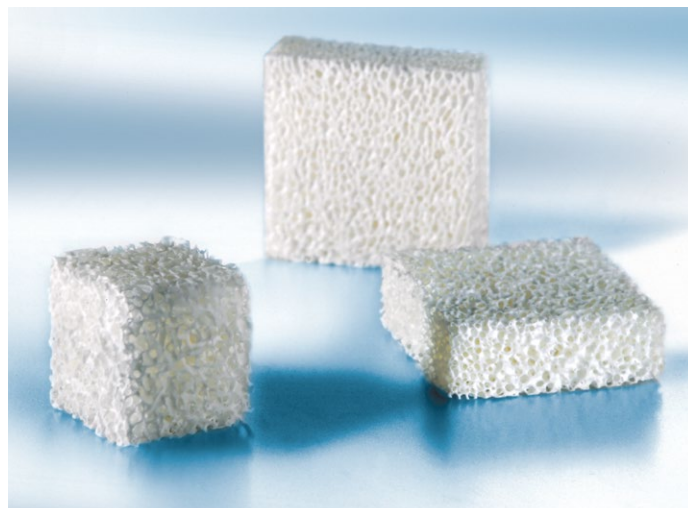

OSTEOVIT®

Méret	Db / csomag	Cikkszám
2 x 2 x 1 cm	10 darab	102 8030
1,5 x 1,5 x 0,5 cm	10 darab	102 8022
1 x 1 x 1 cm	10 darab	102 8014

LYOSTYPT®

Helyi vérzéscsillapító

Leírás

A Lyostypt eredeti kollagén alapanyagú felszívódó vérzéscsillapító. A Lyostypt nagy felületű struktúrája ideális szerkezetet biztosít a vérlemezkék megtapadásához, és további segítséget biztosít véralvadáshoz.

Indikációk

A Lyostypt egy kollagén alapanyagú vérzéscsillapító, amely a következő területeken használható:

- Kapilláris vérzés
- Parenchyma vérzés
- Szivárgó sebvérzés
- Helyi vérzéscsillapítás dialízis során
- Kiegészítő vérzéscsillapítás egyéb vérzéscsillapítási eljárás mellett

Előnyök

- Teljes mértékben felszívódik
- A hatékony és gyors vérzéscsillapításnak köszönhetően alacsony vér- és idővesztesség
- Hatékonyan tapad a vérző felszínhez
- Nem ragad a műszerhez és a kesztyűhöz



LYOSTYPT®

Méret	Db / csomag	Cikkszám
3 x 5 cm	12 darab	106 9128
5 x 8 cm	6 darab	106 9152
10 x 12 cm	4 darab	106 9209

BONE WAX

Csonton belüli mechanikus vérzéscsillapító

Leírás

A Bone Wax méhviasz (70%) és vazelin (30%) steril keveréke, amely megolvasztható és „kézmeleg” állapotban alkalmazható.

Indikációk

- Idegsebészet
- Ortopédia és traumatológia
- Mellkassebészet
- Fogászat, szájsebészet és állkapocssebészet

Előnyök

- Puha, könnyű formázni és applikálni
- Praktikus és átlátszó csomagolás



BONE WAX

Db / csomag

24 darab, mindegyik 2,5 gr.

Cikkszám

102 9754

GELITA

Helyi vérzéscsillapító

Leírás

A Gelita a legtisztább zselatinból készül, ami teljesen felszívódik. A vérzéscsillapító hatást a vörös vértetek tamponfelületéhez történő gyors kötődése biztosítja. Rövid idő alatt természetes véralvadás következik be.

Indikációk

- Vénás, kapilláris, parenchymás vérzés csillapítása, amikor varrat, vagy alátöltés nem lehetséges
- Hátramaradt üregek kitöltése szájsebészetben

Előnyök

- Kiváló felszívódás
- Szöveti kompatibilitás
- Összenyomhatóság



GELITA

Méret	Db / csomag	Cikkszám
1 x 1 x 1 cm	10 darab	207 0014
1 x 1 x 1 cm	50 darab	207 0103
1,5 x 1,5 x 1 cm	50 darab	207 0154
8 x 5 x 1 cm	10 darab	207 0600
8 x 2 x 1 cm	10 darab	207 0707

EGYSZER HASZNÁLATOS STERIL SZIKÉK, MŰANYAG NYÉLLEL ÉS PENGÉVÉDŐVEL



BA 210



BA 211




BA 215



BA 224

Db / csomag	Cikkszám
10 darab	BA 210
10 darab	BA 211
10 darab	BA 215
10 darab	BA 224

SZIKENYELEK ÉS STERIL SZIKEPENGÉK

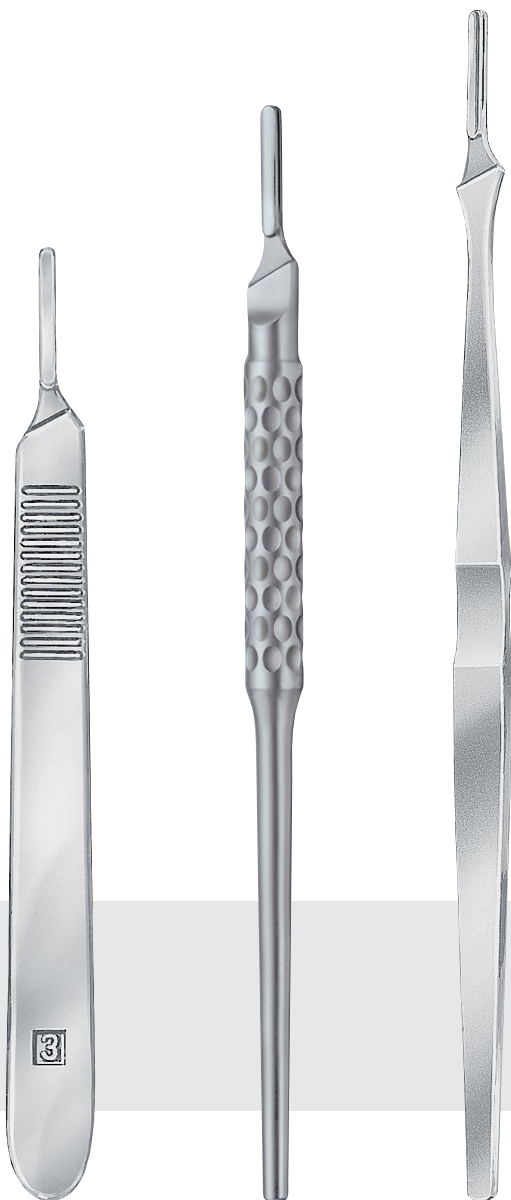

BB 073 R
No. 3

BB 063 R
WATCHTEL

BB 077 R
No. 7



BB 510

BB 512

BB 542



BB 513

BB 515

BB 540

Db / csomag	Cikkszám
100 darab	BB 063 R
100 darab	BB 073 R
100 darab	BB 077 R
100 darab	BB 510
100 darab	BB 512

Db / csomag	Cikkszám
100 darab	BB 513
100 darab	BB 515
100 darab	BB 540
100 darab	BB 542

LIFOSAN® SOFT

Folyékony szappan érzékeny bőrre

LIFOSAN® SOFT ... egy klasszikus a B. Brauntól

BŐRBARÁT

Tulajdonságok

- Kiváló minőségű bőrápoló összetevőinek köszönhetően alkalmas a mindennapi használatra
- Friss, kellemes illat
- Lúg- és szappanmentes
- Bőrsemleges pH-érték
- Nagyon jó bőrkompatibilitás
- Alkalmazható sebészi bemosakodáshoz

Kiszerezési egység	Cikkszám
500 ml	18593
1000 ml	18595



Lifosan® Soft – összetevők

Víz, nátrium-lauril-szulfát, kokamidopropil-betain, nátrium-klorid, C12-15 alkil-laktát, keményítő, hidroxipropiltrimonium-klorid, PEG-6, kapril-gliceridek, tejsav, parfüm, hexil-cinnamal, nátrium-benzoát, CI42090, CI47005

SOFTA-MAN®

Higiénés kézfertőtlenítő szer érzékeny bőrrre

SOFTA-MAN® ... egy klasszikus a B. Brauntól

Tulajdonságok

- Használatra kész alkoholos oldat higiénés kézfertőtlenítéshez és sebészi bemosakodáshoz
- Alkohol-hatóanyagú összetevőkkel
- Hatékony baktériumok (pl.: MRSA, TbB) és gombák ellen
- Virucid a burkos vírusokkal szemben (pl. HBV, HCV, HIV), hatékony a herpes simplex-, adeno-, rota- vaccinia- és norovírusokkal szemben
- Színezékmentes
- Hipoallergén illatanyag felhasználásával készült
- A bőrvédelem érdekében hozzáadott panthenolt és bisabololt tartalmaz

Kíszerelési egység	Cikkszám
500 ml	19746
1000 ml	18440

OTH-engedélyszám

JKF-2031-2/2015

Hatásspektrum	Behatási idő
Higiénés kézfertőtlenítés (OTH)	30 mp
Higiénés kézfertőtlenítés (EN 1500)	15 mp
Sebészi bemosakodás (OTH)	5 x 1 perc
Sebészi bemosakodás (EN 12791)	60 mp
Bemosakodás előtt tisztasági kézmosás és szárazra törítés esetén (OTH)	2 x 1,5 perc
Burkos vírusok (pl.: HBV, HIV, HCV) ¹	15 mp
BVDV (HCV)	15 mp
Vaccinia vírus	15 mp
Madárinfluenza A vírus	15 mp
Rotavírus	15 mp
Herpes simplex vírus	30 mp
Norovírus ²	60 mp
Adenovírus	2 perc

KIVÁLÓ BŐRTOLERANCIA



Softa-Man® – összetevők

Hatóanyag-tartalom 100 g készítményben: 55,7 g etanol (96%-os), 21 g propan-1-ol

Egyéb összetevők: diizopropil-adipát, Softigen 767, dexpanthenol, allantoin, bisabolol, illatanyag, víz

1) A DVV (Német Vírusbetegségeket Ellenőrző Hatóság) és a Robert Koch Intézet irányelve szerint vizsgálva

2) Feline calicivirus (FCV) – macska calicivírus

PROMANUM® PURE

Kézfertőtlenítő szer érzékeny bőrre

PROMANUM® PURE ... különleges bőrápoló összetétel

Tulajdonságok

- Hatóanyaga kétféle alkohol kombinációja
- Baktericid, tuberkolocid, fungicid hatású
- Virucid a burkos vírusokkal szemben (pl. HBV, HCV, HIV), hatékony az adeno-, rota-, vaccinia-, noro-, és poliovírusokkal szemben
- Bőrápoló összetevőket tartalmaz
- Illatanyag- és színezékmentes
- Higiénés kézfertőtlenítés végrehajtása esetén (30 mp) hatékonyan véd az adenovírusokkal szemben

Kiszerezési egység	Cikkszám
500 ml	19727
1000 ml	19728

OTH-engedélyszám

JKF-2030-2/2015

ÚJ

Hatásspektrum	Behatási idő
Higiénés kézfertőtlenítés (OTH)	30 mp
Higiénés kézfertőtlenítés (EN 1500)	15 mp
Sebészi bemosakodás (OTH)	5 x 1 perc
Sebészi bemosakodás (EN 12791)	90 mp
Bemosakodás előtt tisztasági kézmosás és szárazra törítés esetén (OTH)	2 x 1,5 perc
Hatékony a burkos vírusokkal szemben (pl.: HBV, HIV, HCV) ¹	15 mp
BVDV (HCV)	15 mp
Vaccinia vírus	15 mp
Rotavírus	15 mp
Norovírus ²	15 mp
Adenovírus	30 mp
Poliovírus	60 mp

VIRUCID HATÁS 60 MP ALATT³



Promanum® pure – összetevők

Hatóanyag-tartalom 100 g készítményben: 78,1 g etanol (96%-os), 10 g propán-2-ol

Egyéb összetevők: isopropyl myristate, cetearyl ethylhexanoate, povidone, butan-2-one, tisztított víz

1) A DVV (Német Vírusbetegségeket Ellenőrző Hatóság) és a Robert Koch Intézet irányelve szerint vizsgálva

2) Murine NoroVirus (MNV) – Egér NoroVirus

3) EN 14476

TRIXO® ... hagyományos bőrápolás a B. Brauntól

Tulajdonságok

- Olaj a vízben emulzió
- Színezékmentes
- Bőrsemleges pH-érték
- Kellemes, lágy illatanyaggal
- Nem ragad
- Gyorsan felszívódik

Alkalmazás

A Trixo® használandó:

- kézmosás után,
- kézfertőtlenítő eljárások gyakori végzése esetén,
- a kezek fokozott igénybevétele után,
- a teljes bőrfelület ápolására fürdés, zuhanyzás után,
- minden alkalommal, amikor a bőr ápolásra és védelemre szorul.

További információ allergiás felhasználók számára

- Allergológiai tesztelt
- Színezékmentes
- A nagy láncosságú, nyílt láncú (alifás) alkoholokra és lanolinszármazékokra érzékenyek is használhatják

MAGAS SZÍNVONALÚ ÁPOLÁS



Kiszerelési egység	Cikkszám
100 ml	18598
500 ml	18600

Trixo® – összetevők

Víz, ciklometicon, szorbitol, metil-glükóz-szeszkviszearát, folyékony paraffin, cetearil-etil-hexanoát, gliceril-sztearát, fenoxi-etanol, sztearinsav, pantenol, parfüm, poliakrilamid, C13-14 izoparaffin, Laureth-7, bisabolol, citromsav, hidroxizohexil-3-ciklohexén karboxálaldehyd, butil-femnil-metil-propionál, citronellol, alfa-metil-jonon, benzil-szalicilát, linaolol, limonén.

BRAUNOL®

Povidon-jód alapú bőr- és nyálkahártya-fertőtlenítőszer

BRAUNOL® ... alkoholmentes és 1 percen belül hatékony!

A vizes povidon-jód alapú Braunol® fertőtlenítőoldat alkalmas a betegek általános fertőtlenítésére. A készítmény aktív povidon-jód összetevője (10% PVP-jód) biztosítja a széles antimikrobiális hatásspektrumot: baktericid (MRSA), fungicid, tuberkulocid, protozid, virucid.

Alkalmazási területek

Általános betegellátásban, diagnosztikában injekciózás, vérvétel, transzfúzió, infúzió, biopszia, vénapunkció előtt a bőrfelület fertőtlenítésére, decubitus ápolására. Hígítatlanul alkalmazandó!

A Braunol® bőr- és nyálkahártya-fertőtlenítő alkalmazható antiszeptikus öblítésre és betegfürdetésre, sebkezelésre vagy terápiára a hígítási ajánlásoknak megfelelően, hígított vagy hígítatlan formában.

A páciens preoperatív bőrfertőtlenítése során a bőrirritáció elkerülése érdekében ügyeljünk arra, hogy a páciens alatt ne gyűljön össze folyadék („tócsák képződése”).

Behatási idő

A Braunol® oldatot töményen (hígítatlanul) alkalmazzuk injekciózásnál, punkciónál, vérvételnél, transzfúciónál, infúciónál az ép bőrfelület fertőtlenítésére, a felvitel után legalább 1-2 perces behatási idő mellett.

Műteti bőrfelület fertőtlenítése esetén a behatási idő 3 perc.

A Braunol® bőr- és nyálkahártya-fertőtlenítő hígított és hígítatlan oldat formájában különböző klinikai alkalmazási területen használható, részletes tájékoztatót a következő oldalon talál.

TÖBBFÉLE KISZERELÉSBEN

Kiszerelés	Cikkszám
20 × 100 ml	3864065
20 × 250 ml szórófejes palack	18438
10 × 1000 ml	18439

OTH engedély szám

JKF/3161-4/2015



Braunol® – összetevők

A biocid termék hatóanyaga: (100 g oldatban)

Povidon-jód (10% jód tartalom) 7,5 g

Egyéb összetevők: Na-jodát, Na-dihidrogénfoszfát x 2 H₂O, Makrogol 9 – lauril – éter, Na-hidroxid, tisztított víz.

MELISEPTOL® RAPID

Célzott és gyors fertőtlenítés

MELISEPTOL® RAPID ... magas hatékonyság, gyors hatás

Leírás

- Egyszerűen használható – szórófejjel vagy kendő formájában
- Különösen gyors hatás
- Széles hatásspektrum
- Enyhe citrom illat
- Aldehydmentes

Használati utasítás

Öntsön Meliseptol® Rapid oldatot a palackból egy egyszer használatos kendőre és alaposan nedvesítse át a felületet, vagy szórófejjel juttasson a szorból közvetlenül a nehezen elérhető felületekre, amíg teljesen be nem nedvesíti azt, és törölje át egy eldobható kendővel. Öblítés előtt hagyja hatni a szert 1 percig. Tartsa a felületet nedvesen a kívánt behatási idő leteltéig, ne törölje szárazra a felületet. Elektronikus készülékek fertőtlenítése előtt először áramtalanítsa és hagyja lehűlni azokat. Ha ez nem lehetséges, győződjön meg róla, hogy fertőtlenítés közben a készülék nem kapcsolódhat be. Használat előtt ellenőrizze a felület érzékenységét a Meliseptol® Rapid-al szemben!

Kiszerelés	Cikkszám
Hengeralack, 1000 ml (szórófej nélkül)	19048
Műanyag kanna, 5000 ml	19049
Szórófej hengeralackhoz	3908012

Fiziko-kémiai adatok

Megjelenési forma:	tiszta, színtelen folyadék
Sűrűség (20 °C):	kb. 0,98 g/ml
Gyulladáspont (DIN 51 755):	+31 °C
Illat:	enyhe citrom

Behatási idő

Mikroorganizmusok	Vizsgálati módszer	Behatási idő
Felületfertőtlenítés Baktericid, fungicid (C. albicans) és burkos vírusokkal (beleértve HBV, HCV, HIV, Vaccinia vírus, BVDV) szemben virucid	DGHM ¹ /VAH ² 09/2001 (egyenértékű: EN 13727, EN 13624, EN 13697) EN 1040, EN 1275, EN 1276 DVV/RKI*	1 perc
Mycobaktericid (TbB)	DGHM ¹ 09/2001 (egyenértékű: EN 14348)	30 mp
Gombák (A. brasiliensis)	EN 13624	15 perc
Burok nélküli vírusok	DVV/RKI* felületi teszt	10 perc
Madárinfluenza A vírus	DVV/RKI*	15 mp
HBV (DHBV)	DVV/RKI*	15 mp
Rotavírus	DVV/RKI*	1 perc
Adenovírus	DVV/RKI*	1 perc
Polyomavírus	DVV/RKI*	5 perc
Poliovírus	Felületi mennyiségi vizsgálat	10 perc
Norovírus (FCV)	DVV/RKI*	2 perc
Norovírus (MNV)	EN 14476	1 perc

Vizsgálati jegyzőkönyvek igény szerint rendelkezésre állnak
*DVV (Német Vírusbetegségeket Ellenőrző Hatóság) és a Robert Koch Intézet irányelve szerint, mennyiségi szuszpenziós vizsgálatok alapján

VIRUCID HATÁS



Meliseptol® Rapid

100 g oldat tartalmaz: 50 g propan-1-ol, 0,075 g didecil-dimetil-ammonium-klorid, <5% nem ionos felületaktív anyag, illatanyag, tisztított víz
A készítmény összetevői a 648/2004/EK mosó- és tisztítószerekről szóló rendeletnek megfelelően: <5% nem ionos felületaktív anyagok, illatszerek.

Veszélyes áruk címkézése: lásd a biztonsági adatlapot

Figyelmeztetés: A fertőtlenítők használata során ügyeljen a biztonságra! Mindig olvassa el a címkét és a termékátjékoztatót használat előtt! Ne használja a termékeket lejáratú dátum után! Gyermekektől távol tartandó!
Maximális adagolás: 50 ml/m²!

1) DGHM (német rövidítés): Német Higiéniai és Mikrobiológiai Szövetség
2) VAH (német rövidítés): Alkalmazott Higiénia Szövetség

MELISEPTOL® HBV

Fertőtlenítőkendők

MELISEPTOL® HBV ... gyors és praktikus

Leírás

- Praktikus törlekendők fertőtlenítéshez – 1 perces behatási idővel
- Aldehydmentes
- Gazdaságos – utántöltő tasakkal

Használati utasítás

Törölje át a kezelendő felületet, amíg az teljesen nedves nem lesz, majd hagyja a szert hatni 1 percig. Tartsa nedvesen és ne törölje szárazra a felületet a kívánt behatási idő elteltéig.

Alkoholérzékeny felületek (pl.: akrilüveg) kezelésére nem használható! Ne használja forró felületen vagy áram alatt lévő elektronikus eszközökön!

Fertőtlenítőkendők – gyors és gazdaságos

Töltse újra az üres, tiszta, fertőtlenített és száraz Meliseptol® HBV adagolót az utántöltő tasakkal.

Kiszerezés	Cikkszám
Adagoló doboz (100 db kendővel)	19096
Utántöltő tasak (100 db kendővel)	19097

Fiziko-kémiai adatok

Megjelenési forma:	tiszta, színtelen folyadék
Sűrűség (20 °C):	kb. 0,91 g/ml
Gyulladáspont: (DIN 51 755):	+ 31 °C
Illat:	enyhe citrom

Behatási idő

Mikroorganizmusok	Vizsgálati módszer	Behatási idő
Felületfertőtlenítés Baktericid, fungicid (C. albicans) és burkos vírusokkal (beleértve HBV, HCV, HIV, Vaccinia vírus, BVDV) szemben virucid	DGHM ¹ /VAH ² 09/2001 (egyenértékű: EN 13727, EN 13624, EN 13697) EN 1040, EN 1275, EN 1276, DVV/RKI*	1 perc
Mykobaktériumok (TbB)	DGHM ¹ 09/2001 (egyenértékű: EN 14348)	30 mp
Gombák (A. brasiliensis)	EN 13624	15 perc
Burok nélküli vírusok	DVV / RKI* felületi vizsgálat	10 perc
Madárinfluenza A vírus	DVV / RKI*	15 mp
HBV (DHBV)	DVV / RKI*	15 mp
Rotavírus	DVV / RKI*	1 perc
Adenovírus	DVV / RKI*	1 perc
Polyomavírus	DVV / RKI*	5 perc
Poliovírus	Felületi mennyiségi vizsgálat	10 perc
Norovírus (FCV)	DVV / RKI*	2 perc
Norovírus (MNV)	EN 14476	1 perc

Vizsgálati jegyzőkönyvek igény szerint rendelkezésre állnak

*DVV (Német Vírusbetegségeket Ellenőrző Hatóság) és a Robert Koch Intézet irányelve szerint, mennyiségi szuszpenziós vizsgálatok alapján (Német Egészségügyi Közlöny, 2014/01)



Meliseptol® HBV-Kendők

Egy doboz vagy utántöltő tasak tartalmaz 100 darab használatra kész törlekendőt, 211 g Meliseptol® Rapid oldatba áztatva.

A készítmény összetevői a 648/2004/EK mosó- és tisztítószerekről szóló rendeletnek megfelelően: <5% nem ionos felületaktív anyagok.

Veszélyes áruk címkézése: a Meliseptol® HBV kendő nem minősül veszélyes árunak.

Figyelmeztetés: A fertőtlenítők használata során ügyeljen a biztonságra! Mindig olvassa el a címkét és a terméktájékoztatót használat előtt! Ne használja a termékeket lejáratú dátum után! Gyermekektől távol tartandó!

1) DGHM (német rövidítés): Német Higiéniai és Mikrobiológiai Szövetség

2) VAH (Német rövidítés): Alkalmazott Higiénia Szövetség

MELISEPTOL® FOAM PURE

Fertőtlenítőhab érzékeny felületekre

MELISEPTOL® FOAM PURE ... gyors és kíméletes

Leírás

- Alkoholra érzékeny felületekhez – ultrahangos szondákhoz is
- Szórása esetén nem képződik aeroszol
- Rövid behatási idő
- Dermatológiailag tesztelt
- Élelmiszeripari felhasználásra is alkalmas
- B. Braun Wipes kendőkkel alkalmazható impregnáló folyadékként

Használati utasítás

Alaposan terítse be a felületet Meliseptol Foam pure-ral, és törölje át kendővel. A felületet tartsa nedvesen a kívánt behatási idő eléréséig, ne törölje azt szárazra. A behatási időket megtalálja a táblázatban.

Anyagkompatibilitás

A nagy értékű orvosi berendezések, pl.:

- Perfusor® Space
- Infusomat® Space
- akrilüveg
- ultrahang szondák (pl. Philips, Hitachi, Aloka) állagának megóvása érdekében

Kiszerezés	Cikkszám
Szórófejes palack, 750 ml	19797
Műanyag kanna, 5000 ml	19289

Fiziko-kémiai adatokat

Megjelenési forma:	színtelen, szagtalan folyadék
Szag:	enyhe
pH-érték:	kb. 7
Sűrűség (20 °C)	kb. 0,98 g/ml
Gyulladáspont (DIN 51 755):	+ 31,5 °C

Behatási idő

Mikroorganizmusok	Vizsgálati módszer	Expozíciós idő
Baktericid, fungicid (C. albicans) és burkos vírusokkal (beleértve HBV, HCV, HIV, vaccinia vírus, BVDV), valamint rotavírussal szemben virucid	DGHM ¹ /VAH ² 2001 EN 1040 EN 1275 EN 1276 DW/RKI*	Tiszta körülmények között: 1 perc Nem tiszta körülmények között: 2 perc
Fungicid (A. brasiliensis)	EN 13624	60 perc
Mykobaktericid (M. Terrae)	EN 14348 EN 14563	3 perc 1 perc
Influenzavírus A	DW/RKI*	15 másodperc
Rotavírus	DW/RKI*	1 perc
Norovírus	EN 14476	5 perc
Polyomavírus	DW/RKI*	5 perc

A vizsgálati jegyzőkönyvek igény szerint rendelkezésre állnak

*DWV (Német Vírusbetegségek Ellenőrző Hatósága) és a Robert Koch Intézet irányelve szerint, mennyiségi szuszpenziós vizsgálatok alapján

B. Braun törlőkendővel kombinálva

A Meliseptol® Foam pure alkalmazható impregnáló folyadékként a B. Braun wipes kendőkkel. Az oldat 4 hétig felhasználható az adagolóban.

ÉRZÉKENY ORVOSI BERENDEZÉSEKHEZ



Meliseptol® Foam pure

100 g oldat tartalma: 17 g propán-1-ol, 0,23 g didecil-dimetil-ammoniumklorid. Segédanyagok: < 5% nemionos felületaktív anyag, tisztított víz. A készítmény összetevői a 648/2004/EK mosó- és tisztítószerekről szóló rendeletnek megfelelően: <5% nemionos felületaktív anyagok.

Veszélyes áruk címkézése: lásd a biztonsági adatlapot

Figyelmeztetés: A fertőtlenítők használata során ügyeljen a biztonságra! Mindig olvassa el a címkét és a terméktájékoztatót használat előtt! Ne használja a termékeket lejáratú dátum után! Gyermekektől távol tartandó!

1) DGHM (német rövidítés): Német Higiéniai és Mikrobiológiai Szövetség

2) VAH (német rövidítés): Alkalmazott Higiénia Szövetség

MELISEPTOL® WIPES SENSITIVE

Fertőtlenítőkendők érzékeny felületekre

MELISEPTOL® WIPES SENSITIVE ... a nagy értékű orvosi berendezések állagának megóvásához

Előnyök

- A puha, szőszmentes, gyapjú minőségű kendők megvédik a különösen érzékeny felületeket a karcólástól.
- A Meliseptol® Foam pure oldat nem károsítja az érzékeny felületeket. Az impregnáló oldat csekély mennyisége révén minimális az esélye a szer berendezésbe való beszívargásának, továbbá a finom berendezések nyílásainak eltömítése is elkerülhető.
- Ultrahangos berendezések számos típusához használható.

Anyagkompatibilitás

- Dialog+® hemodialízis-berendezések
- Perfusor® Space automata infúziós pumpák
- Infusomat® Space automata infúziós pumpák
- Ultrahangkészülékek és transzdúcerek (pl. Philips, Hitachi, ALOKA)
- Akrilüveg
- Latex és gumi
- Szilikon
- Vizsgálószékek és -asztalok

PRAKTIKUS
ÚJRATÖLTHETŐ
ADAGOLÓVAL



Az impregnáló oldat fiziko-kémiai adatai

Megjelenési forma:	színtelen, szagtalan folyadék
pH-érték:	kb. 7
Sűrűség (20 °C)	kb. 0,98 g/ml
Gyulladáspont (DIN 51 755):	+ 31,5 °C
Szag:	illatanyagmentes

Behatási idő

Mikroorganizmusok	Vizsgálati módszer	Behatási idő
Felületfertőtlenítés Baktericid, élesztőgombák (C. albicans) és burkos vírusokkal (beleértve HBV, HCV, HIV, vaccinia vírus, BVDV), valamint rotavírussal szemben virucid	DGHM ¹ /VAH ² 2001 EN 1040 EN 1275 EN 1276 DVV/RKI*	Tiszta körülmények között: 1 perc nem tiszta körülmények között: 2 perc
Gombák (A. brasiliensis)	EN 13624	60 perc
Mykobaktériumok (M. Terrae)	EN 14348 EN 14563	3 perc 1 perc
Madárinfluenza A vírus	DVV/RKI*	15 mp
Rotavírus	DVV / RKI*	1 perc
Norovírus (MNV)	EN 14476	5 perc
Polyomavírus	DVV/RKI*	5 perc

Vizsgálati jegyzőkönyvek igény szerint rendelkezésre állnak
*DW (Német Vírusbetegségeket Ellenőrző Hatóság) és a Robert Koch Intézet irányelve szerint, mennyiségi szuszpenziós vizsgálatok alapján

Használati utasítás

Törölje át a felületet Meliseptol® Wipes Sensitive kendőkkel, amíg az teljesen nedves nem lesz. Hagyja a felületet nedvesen a kívánt behatási idő elteltéig, a szer behatási ideje megtalálható a fenti táblázatban.

Ne használja forró felületeken, vagy áram alatt lévő elektronikus eszközökön.

Az adagoló doboz utántöltése: nyissa fel a zacskót és helyezze a tekercset az adagoló dobozba. A tekercs közepén lévő kendőt húzza ki és vezesse át az adagoló doboz levehető tetején, ezután tekerje vissza az adagoló doboz tetejét.

Kiszerelés	Cikkszám
Adagoló doboz (60 db kendővel)	19582
Utántöltő tasak (60 db kendővel)	19530

Meliseptol® Wipes Sensitive

Egy adagoló vagy újratölthető doboz 60 db használatra kész 300 g-os Meliseptol® Foam pure oldattal átitatott törlőkendőt tartalmaz.
A készítmény összetevői a 648/2004/EK mosó- és tisztítószerrekről szóló rendeletnek megfelelően: <5% nem ionos felületaktív anyagok.

Veszélyes áruk címkézése: a Meliseptol® Wipes Sensitive nem minősül veszélyes árunak.

Figyelmeztetés: A fertőtlenítők használata során ügyeljen a biztonságra! Használat előtt mindig olvassa el a termék címkézését és a használati utasítást! Gyermekektől távol tartandó!

1) DGHM (német rövidítés): Német Higiéniai és Mikrobiológiai Szövetség

2) VAH (német rövidítés): Alkalmazott Higiénia Szövetség

FALI KAROS ADAGOLÓK



ÚJ

FALI ADAGOLÓ MŰANYAG PUMPÁVAL

Tulajdonságok

- Alumíniumborítás
- Állítható adagolás: 0,5 ml – 1,5 ml
- A műanyag pumpa az összes B. Braun által gyártott kézmosó, kézfertőtlenítő és bőrápoló termékkel használható
- pH-semleges tisztítószerrel minden alkatrész tisztítható fertőtlenítő mosogatógépben
- 134°C-on és 3 bar nyomás alatt autoklávozható
- A műanyag pumpa nem autoklávozható

Kiszerelési egység	Cikkszám
500 ml-es palackhoz Karhosszúság: 100 mm	1418893
1000 ml-es palackhoz Karhosszúság: 100 mm	1418892
500 ml-es palackhoz Karhosszúság: 170 mm	1418894
1000 ml-es palackhoz Karhosszúság: 170 mm	1418895

FALI ADAGOLÓ FÉMPUMPÁVAL

Tulajdonságok

- Alumíniumborítás
- Állítható adagolás: 0,5 ml – 1,5 ml
- A fémpumpa az összes B. Braun által gyártott kézmosó, kézfertőtlenítő és bőrápoló termékkel használható
- Minden alkatrész fertőtlenítő mosogatógépben tisztítható, autoklávozható 134 °C-on, 3 bar nyomás alatt

Kiszerelési egység	Cikkszám
500 ml-es palackhoz Karhosszúság: 100 mm	4400010
1000 ml-es palackhoz Karhosszúság: 100 mm	4400009A
500 ml-es palackhoz Karhosszúság: 170 mm	4400114
1000 ml-es palackhoz Karhosszúság: 170 mm	4400115

ELŐNYÖK:

- A pumpa cseréje az elülső oldalról lehetséges
- A műanyag pumpa is kompatibilis a Trixo® termékcsaláddal
- A borítás 134 °C-on autoklávozható

A garanciális feltételek csak B. Braun termékek használata esetén érvényesek.

FALI TARTÓK



FALI TARTÓK

Tulajdonságok

- Rozsdamentes acél
- Kétoldalú tapadó lappal rögzíthető a biztos tartásért



FALI KAROS ADAGOLÓ MŰANYAG PUMPÁVAL ÉS SZÁMLÁLÓVAL

Tulajdonságok

- A beépített számláló megbízhatóan méri az elvégzett kézfertőtlenítő eljárások számát
- Alumíniumborítás
- Állítható adagolás: 0,5 ml – 1,5 ml
- A számláló kivételével minden alkatrész tisztítható fertőtlenítő mosogatógépben pH-semleges tisztítószerrel
- A műanyag pumpa és a számláló kivételével minden alkatrész autoklávozható



ÉRINTÉSMENTES ADAGOLÓ CSEPPFOGÓ TÁLCÁVAL

Tulajdonságok

- Szenzoros adagoló, a kézhigiéniai gyakorlat javítása érdekében
- Az összes B. Braun által forgalmazott szappanhoz, fertőtlenítőhöz, bőrápoló termékhez alkalmazható
- Autoklávozható (max. 123 °C)
- Karcolásnak ellenálló, eloxált alumíniumborítás
- Elemmel működik
- Adagolókkal ellátva (üzembiztonság érdekében)
- Állítható adagolás: 0,75 ml – 1,5 ml
- Csepptálcát tartalmaz

Kiszerezési egység	Cikkszám
500 ml-es palackhoz	3908339
1000 ml-es palackhoz	3908340

Kiszerezési egység	Cikkszám
500 ml-es palackhoz Karhosszúság: 170 mm	4400116
1000 ml-es palackhoz Karhosszúság: 170 mm	4400117

Kiszerezési egység	Cikkszám
500 ml-es palackhoz	4400774
1000 ml-es palackhoz	3908403

A garanciális feltételek csak B. Braun termékek használatára érvényesek.

ADAGOLÓPUMPÁK



KÉZI ADAGOLÓPUMPÁK

Tulajdonságok

- 500 és 1000 ml-es palackokhoz
- Hosszúcsás adagolócső
- Dózis: kb. 1 ml
- Egyszer használatos
- Nincs beépített mérőeszköz

Kiszerelési egység	Cikkszám
Kézi adagoló 500 ml-es palackhoz	82176
Kézi adagoló 1000 ml-es palackhoz	82177



KÉZI ADAGOLÓPUMPÁK, VISSZAFOLYÁSGÁTLÓ SZELEPPEL

Tulajdonságok

- 500 és 1000 ml-es palackokhoz
- Kerek fej
- Dózis: kb. 2 ml
- Egyszer használatos
- Nincs beépített mérőeszköz
- Visszafolyásgátló szeleppel

Kiszerelési egység	Cikkszám
500 ml-es palackhoz	3908380
1000 ml-es palackhoz	3908381



KÉZI ADAGOLÓPUMPÁK, VISSZAFOLYÁSGÁTLÓ SZELEPPEL, HOSSZÚ ADAGOLÓCSŐVEL


Tulajdonságok

- 500 és 1000 ml-es palackokhoz
- Kerek fej, hosszú szívócsővel (80 mm)
- Dózis: kb. 1,7 ml, a szívócső hossza 80 mm
- Visszafolyásgátló szeleppel

Kiszerelési egység	Cikkszám
500ml-es palackhoz	3908405
1000ml-es palackhoz	3908404

EGYSZER HASZNÁLATOS STERICAN® TŰK

MINDEN RÉSZLETÉBEN MEGFELEL A GYAKORLATNAK

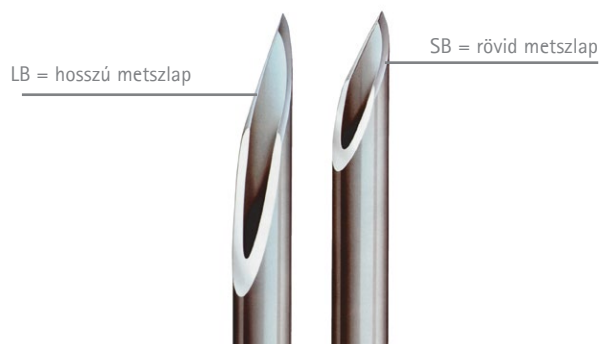

Jellemzők

- Latexmentes
- PVC-mentes
- könnyű azonosítás az ISO 6009 szerinti színekódolású kónusszal
- Csekély fájdalmat okozó, háromszoros csiszolású leélezés az indikációnak megfelelő csiszolási hosszal
- Szilikonbevonattal ellátott felület

A kanülcső vékonyfalú kiképzése nagyobb mértékű átfolyást tesz lehetővé

Áttetsző Luer-lock csatlakozó

Kanülcső rendkívül sima felületű, rozsdamentes króm-nikkel acélból

STERIL INJEKCIÓS TŰK STANDARD MÉRETEKBEN

Sterican® Egyszer használatos tűk az ISO 7864 és a DIN 13097 szerint								
Tű/Színkód	Méretek	Tűméret	Ø mm	Hossz mm	Metszlap	Indikációk	Cikkszám	
Fekete	12	22 G x 1 1/4"	0,70	30	LB	i.v., i.m. kis mennyiségek	4657624	
Kék	14	23 G x 1 1/4"	0,60	30	LB	i.v., i.m. kis mennyiségek	4657640	
Kék	16	23 G x 1"	0,60	25	LB	i.v., i.m. kis mennyiségek	4657667	
Lila	17	24 G x 1"	0,55	25	LB	i.v., s.c., kézvéna, gyermekgyógyászat	4657675	
Barna	18	26 G x 1"	0,45	25	LB	i.v., s.c., kézvéna, gyermekgyógyászat	4657683	
Szürke	20	27 G x 3/4"	0,40	20	LB	i.v., s.c.	4657705	

STERIL INJEKCIÓS TŰK FOGÁSZATI ÉRZÉSTELENÍTÉSHEZ

Sterican® Egyszer használatos fogászati tűk az ISO 7864 és a DIN 13097 szerint						
Tű/Színkód	Tűméret	Ø mm	Hossz mm	Metsz lap	Indikációk	Cikkszám
 Narancs	25 G x 1 1/2"	0,50	40	LB	Alsó-felső állkapocs, regionális anesztézia	9186166
 Szürke	27 G x 1 1/2"	0,40	40	LB	Alsó-felső állkapocs, regionális anesztézia	9186182
 Narancs	25 G x 1"	0,50	25	LB	Infiltrációs anesztézia a felső állkapocs és az elülső fogak területén	9186158
 Szürke	27 G x 1"	0,40	25	LB	Az idegi tartományban végzett érzéstelenítéshez	9186174

Steril injekciós tűk fogászati érzéstelenítéshez

Sterican® Egyszer használatos tűk speciális indikációkhoz az ISO 7864 és a DIN 13097 szerint						
Tű/Színkód	Tűméret	Ø mm	Hossz mm	Metsz lap	Indikációk	Cikkszám
 Barna	26 G x 1/2"	0,45	12	LB	Inzulin	4665457
 Szürke	27 G x 1/2"	0,40	12	LB	Inzulin	4665406
 Sárga	30 G x 1/2"	0,30	12	LB	Inzulin	4656300
 Narancs	25 G x 5/8"	0,50	16	LB	Heparin/Tuberkulin	4665853

Minden injekciós tű eladási egysége: egy karton - 100 darab (egyenként sterilen csomagolva)

INJEKT

Egyszer használatos, kétrészes fecskendők zöld dugattyúval

Jellemzők

- Kitűnően átlátszó henger
- Fekete beosztás
- Ideális leolvashatóság
- Törésálló
- A névleges térfogaton túl meghosszabbított beosztás
- Minimális maradéktérfogat
- Biztonságos dugattyú-megállás
- Latexmentes/PVC-mentes
- Szilikonolaj-mentes



Injekt Luer csatlakozó	Skálabeosztás léptéke	Kónusz	Cikkszám
2 ml használható 3 ml-ig	0,1 ml	centrikus	4606027 V
5 ml használható 6 ml-ig	0,2 ml	excentrikus	4606051 V
10 ml használható 12 ml-ig	0,5 ml	excentrikus	4606108 V
20 ml használható 24 ml-ig	1,0 ml	excentrikus	4606205 V

Injekt Luer-lock csatlakozó	Skálabeosztás léptéke	Kónusz	Cikkszám
2 ml használható 3 ml-ig	0,1 ml	centrikus	4606701 V
5 ml használható 6 ml-ig	0,2 ml	centrikus	4606710 V
10 ml használható 12 ml-ig	0,5 ml	centrikus	4606728 V
20 ml használható 24 ml-ig	1,0 ml	centrikus	4606736 V

OMNIFIX®

Egyszer használatos, háromrészes fecskendők

Jellemzők

- Kitűnően átlátszó henger
- Fekete beosztás
- Ideális leolvashatóság
- Törlésálló
- Könnyen csúszó dugattyúfej dupla tömítőgyűrűvel
- Minimális maradéktérfogat
- Biztonsági dugattyúfék
- Latexmentes, PVC-mentes
- Omnifix®-F beosztás 0,01 ml



Omnifix® Luer csatlakozó	Skálabeosztás léptéke	Kónusz	Cikkszám
1 ml	0,01 ml	centrikus	9161406 V
3 ml	0,1 ml	centrikus	4616025 V
5 ml	0,2 ml	excentrikus	4616057 V
10 ml	0,5 ml	excentrikus	4616103 V
20 ml	1,0 ml	excentrikus	4616200 V
30 ml	1,0 ml	excentrikus	4616308 F
50 ml	1,0 ml	excentrikus	4616502 F

Minden fecskendő eladási egysége: 1 karton - 100 darab (egyenként sterilen csomagolva)

Omnifix® Luer-lock csatlakozó	Skálabeosztás léptéke	Kónusz	Cikkszám
3 ml	0,1 ml	centrikus	4617022 V
5 ml	0,2 ml	centrikus	4617053 V
10 ml	0,5 ml	centrikus	4617100 V
20 ml	1,0 ml	centrikus	4617202 V
30 ml	1,0 ml	centrikus	4617304 V
50 ml	1,0 ml	centrikus	4617509 F

MEDIBOX[®]

A biztonságos hulladékkezeléshez

Kanülggyűjtő a használt tűk biztonságos kezeléséhez –
5 liter térfogatú tartályként is kapható.

Egység	Csomag	Cikkszám
10 db	Kanülggyűjtő	9193405
10 db	5,5 l befogadóképességgel	9193421



B. Braun Trading Kft. | 1023 Budapest, Felhévízi u. 5.
Tel.: +36 (1) 346 9700 | Fax: +36 (1) 438 4900
www.bbraun.hu | www.facebook.com/BBraunHU/